



Руководство по установке

RadiForce® RX360

Цветной ЖК-монитор

Важно

Внимательно прочтите настоящую «Руководство по установке» и «Инструкцию по эксплуатации» (отдельный документ), чтобы ознакомиться с правилами безопасной и эффективной эксплуатации.

-
- За информацией по установке / подключению монитора обратитесь к «Инструкцию по эксплуатации».
 - Последнюю информацию об изделии, в том числе «Руководство по установке», можно получить на нашем веб-сайте :
<http://www.eizoglobal.com>
-

Это устройство было специально адаптировано для использования в регионе, в который оно изначально поставлялось. При использовании этого устройства за пределами данного региона оно может работать не так, как указано в его характеристиках.

Никакая часть этого руководства не может быть воспроизведена, сохранена в системе хранения данных или передана в любой форме, любыми средствами — электронными, механическими или любыми другими — без предварительного согласия корпорации EIZO Corporation, полученного в письменной форме.

Корпорация EIZO Corporation не принимает на себя обязательств по обеспечению конфиденциальности предоставляемого материала или информации без предварительных договоренностей, соответствующих соглашению корпорации EIZO Corporation относительно указанной информации. Несмотря на то, что были приняты все меры для обеспечения актуальности информации, содержащейся в данном руководстве, следует учесть, что технические характеристики монитора EIZO могут изменяться без предварительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ


СОДЕРЖАНИЕ	3
Глава 1 Список основных операций и функций	5
1-1. Использование кнопок и подсказок для кнопок	5
1-2. Основные операции меню настроек	7
1-3. Список функций	9
Глава 2 Регулировки экрана	10
2-1. Поддерживаемые разрешения	10
2-2. Настройка входного сигнала	10
2-3. Выбор режима отображения (CAL Switch Mode)	11
2-4. Регулировка яркости / цветопередачи ...	12
● Регулируемые параметры в каждом режиме	12
● Регулировка яркости	12
● Включение или выключение гибридной гаммы на уровне пикселей	13
● Регулировка контраста	13
● Регулировка цветовой температуры	14
● Регулировка гаммы	15
● Регулировка оттенка	15
● Регулировка насыщенности цвета	15
● Регулировка усиления	16
2-5. Отображение дополнительного окна ...	17
● Настройка входного сигнала для дополнительного окна PinP	18
● Настройка режима отображения (CAL Switch Mode) для дополнительного окна PinP	18
● Настройка положения отображения дополнительного окна PinP	18
● Отображение или скрытие дополнительного окна PinP	18
2-6. Включение или выключение восстановления резкости (функции коррекции четкости изображения)	19
Глава 3 Управление качеством монитора ...	20
3-1. Использование функции автокалибровки	20
● Выполнение автокалибровки	20
● Проверка результатов автокалибровки	21
3-2. Использование функции проверки оттенков серого	21
● Выполнение проверки оттенков серого	21
● Проверка результатов проверки оттенков серого	22
3-3. Настройка отображения / скрытия предупреждений или истории контроля качества	22
Глава 4 Использование монитора в течение длительного периода времени	23
4-1. Настройка режима энергосбережения ...	23
4-2. Настройка перехода в режим энергосбережения при удалении пользователя	24
Глава 5 Выбор настроек монитора	25
5-1. Выбор языка	25
5-2. Отображение значка для переключения портов USB в подсказках для кнопок	25
5-3. Переключение между ПК, используемыми с устройствами USB ...	26
5-4. Автоматическое определение входного сигнала	26
5-5. Переключение размера изображения ...	27
5-6. Установка версии DisplayPort 1	28
5-7. Установка частоты обновления для сигнала DVI	28
5-8. Установка ориентации изображений при выводе	29
5-9. Регулировка яркости индикатора выключателя питания	29
5-10. Пропуск неиспользуемых режимов отображения	30
5-11. Включение или выключение передачи данных через DisplayPort в режиме энергосбережения	30
5-12. Блокировка кнопок управления	31
5-13. Настройка отображения или скрытия предупреждения об ошибке отображения оттенков серого	31
5-14. Получение данных по прогнозируемому сроку службы	32
5-15. Настройка отображения или скрытия логотипа EIZO	32
5-16. Просмотр информации о мониторе	33
5-17. Сброс с установкой значений по умолчанию	34
● Сброс настроек цветопередачи	34
● Сброс всех настроек	34

Глава 6 Поиск и устранение неисправностей	35
6-1. Отсутствует изображение.....	35
6-2. Плохое изображение	36
6-3. Другие неисправности.....	37
● Таблица кодов ошибок	39
Глава 7 Справочная информация	40
7-1. Процедура установки кронштейна	40
7-2. Как пользоваться концентратором USB.....	42
7-3. Основные настройки по умолчанию	43
Приложение.....	44
Товарный знак	44
Лицензия	44
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ.....	45
Сведения по утилизации	46


Глава 1 Список основных операций и функций







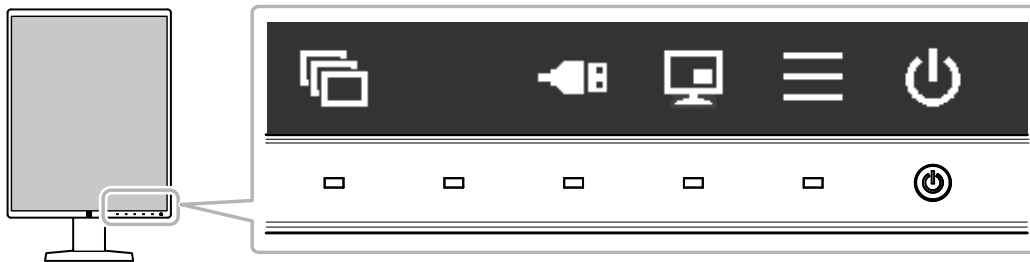

1-1. Использование кнопок и подсказок для кнопок

1. Отображение руководства по эксплуатации

Прикоснитесь к любой кнопке (кроме ).

На экране появятся подсказки для кнопок.



Отображение	Функция
	Включение или выключение питания.
	Отображение меню настроек. Меню настроек используется для выбора расширенных настроек монитора.
	Отображение или скрытие дополнительного окна PinP. Чтобы получить дополнительные сведения о переключении между режимами отображения, см. «2-5. Отображение дополнительного окна» (стр. 17) . Внимание <ul style="list-style-type: none"> По умолчанию, в подсказках для кнопок этот элемент не отображается. См. «Настройка входного сигнала для дополнительного окна PinP» (стр. 18), чтобы получить сведения о том, как отобразить его.
	Переключение между ПК, используемыми с устройствами USB. Чтобы получить дополнительные сведения о переключении между ПК, см. «5-3. Переключение между ПК, используемыми с устройствами USB» (стр. 26) . Внимание <ul style="list-style-type: none"> По умолчанию, в подсказках для кнопок этот элемент не отображается. См. «5-2. Отображение значка для переключения портов USB в подсказках для кнопок» (стр. 25), чтобы получить сведения о том, как отобразить его.
	Переключение между режимами отображения. Чтобы получить дополнительные сведения о переключении между режимами отображения, см. «2-3. Выбор режима отображения (CAL Switch Mode)» (стр. 11) .
	Выбор какого-либо пункта.
	Применение действия к выделенному содержимому.
	Отмена выделения.

2. Регулировка / настройка


1. Прикоснитесь к кнопке, обозначенной значком того пункта, который вы хотите выбрать. Появится меню.
2. Для выбора тех или иных настроек воспользуйтесь соответствующими кнопками. При необходимости выберите , чтобы применить настройку.

3. Выход

Выберите для выхода из меню.




1-2. Основные операции меню настроек

1. Отображение меню настроек

1. Выберите  из подсказок для кнопок.
Появится меню настроек.




Примечание




- Для выполнения регулировок или настроек в меню «Administrator Settings» откройте меню настроек, как описано ниже:
 1. Выберите , чтобы выключить монитор.
 2. Касаясь крайней кнопки слева () , прикоснитесь к кнопке  и удерживайте ее не менее двух секунд, чтобы включить монитор.
Откроется меню «Administrator Settings».


2. Регулировка / настройка

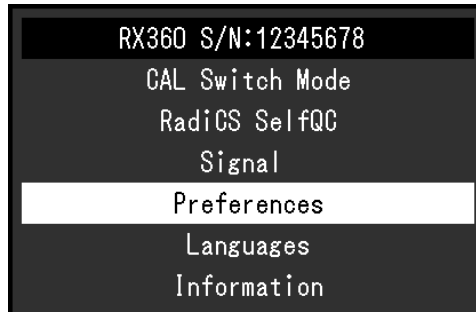1. Выберите меню для регулировки / настройки с помощью   , затем выберите .




Появится меню расширенных настроек.

2. Выберите какой-либо пункт для регулировки / настройки с помощью   , затем выберите .

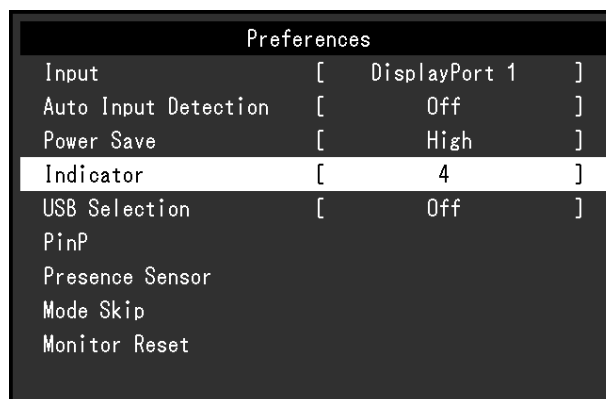


Появится меню регулировки / настройки.

3. Выполните регулировку/настройку с помощью **<** **>** или **▲** **▼** и выберите **✓** для подтверждения изменений.

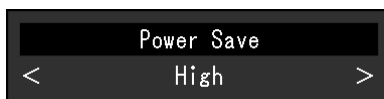

Примечание

- Настройки из меню «Administrator Settings» применяются после выбора команды «Apply (Применить)».

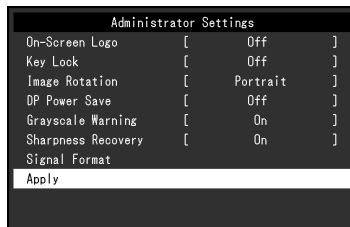

3. Выход

Выберите несколько раз **✕** для выхода из меню настроек.

Примечание

- Выход из пунктов меню «Administrator Settings» выполняется после выбора команды «Apply (Применить)».
-

1-3. Список функций

В следующей таблице изображены элементы меню настроек.

Главное меню	Пункт	Ссылка
CAL Switch Mode	Mode	«2-4. Регулировка яркости / цветопередачи» (стр. 12) Примечание • Функции, которые могут быть отрегулированы или настроены в меню «CAL Switch Mode (режим CAL Switch)» различаются в зависимости от режима (см. «Регулируемые параметры в каждом режиме» (стр. 12))).
	Brightness	
	Hybrid Gamma PXL	
	Contrast	
	Temperature	
	Gamma	
	Hue	
	Saturation	
	Gain	
	Reset	
RadiCS SelfQC	SelfCalibration	«3-1. Использование функции автокалибровки» (стр. 20)
	Grayscale Check	«3-2. Использование функции проверки оттенков серого» (стр. 21)
	LEA	«5-14. Получение данных по прогнозируемому сроку службы» (стр. 32)
	Settings	«3-3. Настойка отображения / скрытия предупреждений или истории контроля качества» (стр. 22)
Signal	Picture Expansion	«5-5. Переключение размера изображения» (стр. 27)
Preferences	Input	«2-2. Настройка входного сигнала» (стр. 10)
	Auto Input Detection	«5-4. Автоматическое определение входного сигнала» (стр. 26)
	Power Save	«4-1. Настройка режима энергосбережения» (стр. 23)
	Indicator	«5-9. Регулировка яркости индикатора выключателя питания» (стр. 29)
	USB Selection	«5-2. Отображение значка для переключения портов USB в подсказках для кнопок» (стр. 25)
	PinP	«2-5. Отображение дополнительного окна» (стр. 17)
	Presence Sensor	«4-2. Настройка перехода в режим энергосбережения при удалении пользователя» (стр. 24)
	Mode Skip	«5-10. Пропуск неиспользуемых режимов отображения» (стр. 30)
	Monitor Reset	«5-17. Сброс с установкой значений по умолчанию» (стр. 34)
Languages		«5-1. Выбор языка» (стр. 25)
Information		«5-16. Просмотр информации о мониторе» (стр. 33)
Administrator Settings	On-Screen Logo	«5-15. Настройка отображения или скрытия логотипа EIZO» (стр. 32)
	Key Lock	«5-12. Блокировка кнопок управления» (стр. 31)
	Image Rotation	«5-8. Установка ориентации изображений при выводе» (стр. 29)
	DP Power Save	«5-11. Включение или выключение передачи данных через DisplayPort в режиме энергосбережения» (стр. 30)
	Grayscale Warning	«5-13. Настройка отображения или скрытия предупреждения об ошибке отображения оттенков серого» (стр. 31)
	Sharpness Recovery	«2-6. Включение или выключение восстановления резкости (функции коррекции четкости изображения)» (стр. 19)
	Signal Format	«5-6. Установка версии DisplayPort 1» (стр. 28) , «5-7. Установка частоты обновления для сигнала DVI» (стр. 28)

Глава 2 Регулировки экрана

2-1. Поддерживаемые разрешения


Сведения о совместимых разрешениях монитора см. в разделе «Поддерживаемые разрешения» в Инструкцию по эксплуатации.

2-2. Настройка входного сигнала

Возможен выбор входного сигнала для отображения на экране.

Порядок действий

1. В меню настроек выберите «Preferences», затем выберите .
2. Выберите «Input», а затем .
3. Выберите «Display Port 1», «Display Port 2» или «DVI» и нажмите .

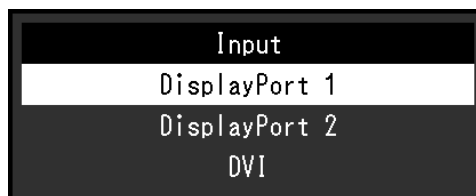


Внимание

- Если выключить, а затем снова включить основное питание, происходит автоматическое определение входного сигнала, независимо от настройки.
- Если ПК, с которого выводится заданный сигнал, переходит в режим энергосбережения или выключается, когда для параметра «Auto Input Detection (Автоматическое определение ввода)» установлено значение «On (Вкл.)», автоматически отображается любой другой доступный сигнал. Для получения дополнительной информации см. «5-4. Автоматическое определение входного сигнала» (стр. 26).
- Сигналы, которые могут быть отображены в дополнительном окне, отличаются в зависимости от сигналов, отображаемых на главном экране. При изменении входного сигнала для главного экрана «PinP Display (Дисплей PinP)» может перейти в состояние «Off (Выкл.)». Более подробную информацию см. в «2-5. Отображение дополнительного окна» (стр. 17).

Примечание

- По завершении настроек будут показаны названия входных портов.

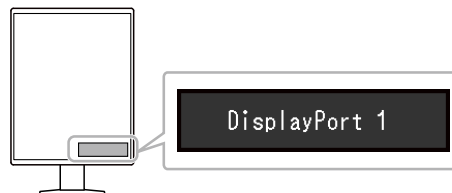

2-3. Выбор режима отображения (CAL Switch Mode)



Можно выбрать режим отображения в соответствии с применением монитора. Чтобы получить сведения о том, как задать режим отображения для дополнительного окна PinP, см. «Настройка режима отображения (CAL Switch Mode) для дополнительного окна PinP» (стр. 18).

Режимы отображения


√: Возможна калибровка




Режим	Назначение	
1-DICOM	Отображение с использованием характеристик шкалы серого в соответствии со стандартом DICOM®, Часть14.	√
2-CAL1	Отображение экрана, настроенного с помощью программного обеспечения калибровки.	√
3-CAL2		√
4-Custom	Выберите этот режим, чтобы задать желаемые настройки.	-
5-sRGB	Подходит для использования с периферийными устройствами, совместимыми с sRGB.	-
6-Text	Подходит для отображения документов, таблиц или иного текста.	-

Порядок действий

1. Прикоснитесь к любой кнопке (кроме ).
2. Выберите  из подсказок для кнопок.
Меню выбора режима отображается снизу справа.

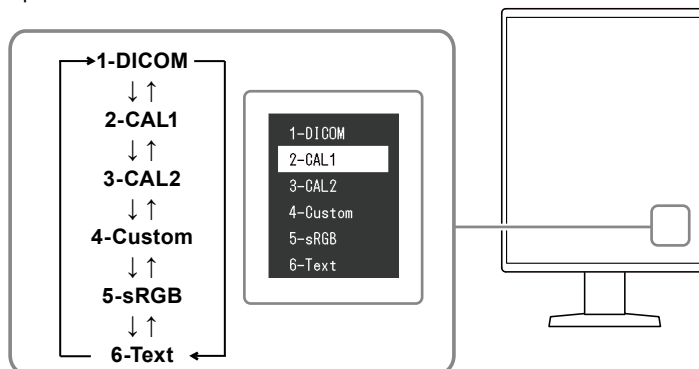Пример:



3. Последовательное изменение режима происходит каждый раз при выборе .
Также для изменения режима можно выбрать  или , когда отображается меню выбора режима.

Примечание

- Одновременное отображение меню настроек и меню выбора режима невозможно.

2-4. Регулировка яркости / цветопередачи

Регулировку яркости и цветопередачи можно выполнить для каждого режима с сохранением настроек.

Внимание

- Для достижения стабильных характеристик электрических компонентов изделия требуется около 15 минут. Подождите около 15 минут или дольше после включения монитора или возвращения его из режима энергосбережения, прежде чем приступать к регулировкам.
- То же изображение может наблюдаться в разной цветовой гамме на множественных мониторах из-за специфических характеристик каждого монитора. Точные регулировки цветопередачи следует выполнять визуально, сравнивая цвета на разных мониторах.

Примечание

- Значения, отображаемые в «%» или «К» используются только для справки.

● Регулируемые параметры в каждом режиме

Состав регулируемых функций может различаться в зависимости от типа режима. (Функции, которые нельзя регулировать или настраивать, недоступны для выбора.)

√: Регулируемая функция - Нерегулируемая функция

Функция	CAL Switch Mode					
	1-DICOM	2-CAL1	3-CAL2	4-Custom	5-sRGB	6-Text
Brightness	√	√	√	√	√	√
Hybrid Gamma PXL	√	√	√	-	-	-
Contrast	-	-	-	√	√	√
Temperature	-	-	-	√	√	√
Gamma	-	-	-	√	√	√
Hue	-	-	-	√	√	√
Saturation	-	-	-	√	√	√
Gain	-	-	-	√	√	√
Reset	√	√	√	√	√	√

● Регулировка яркости

Яркость экрана регулируется изменением яркости подсветки (источника света на задней панели ЖКД).

Диапазон настройки

От 0 до 100 %

Порядок действий

1. В меню настроек выберите «CAL Switch Mode (режим CAL Switch)», затем выберите .
2. Выберите «Brightness (Яркость)», а затем .
3. Задайте настройку, используя или .
4. После завершения настроек выберите .

● Включение или выключение гибридной гаммы на уровне пикселей

Когда включена функция «Hybrid Gamma PXL (Гибридная гамма на уровне пикселей)», данное изделие автоматически различает на уровне пикселей монохромные и цветные части одного изображения и отображает цветное изображение, используя соответствующее значение гаммы.

Диапазон настройки

«On (Вкл.)», «Off (Выкл.)»

Порядок действий

1. В меню настроек выберите «CAL Switch Mode (Режим CAL Switch)», затем выберите .
2. Выберите «Hybrid Gamma PXL (Гибридная гамма на уровне пикселей)», а затем – .
3. Выберите «On (Вкл.)» или «Off (Выкл.)», затем выберите .

Внимание

- При отображении в PinP настройки для «Hybrid Gamma PXL (Гибридная гамма на уровне пикселей)» на родительском экране отображаются на всем экране.
-

● Регулировка контраста

Яркость экрана отрегулирована варьированием уровня видео сигнала.

Диапазон настройки

От 0 до 100 %

Порядок действий

1. В меню настроек выберите «CAL Switch Mode (режим CAL Switch)», затем выберите .
2. Выберите «Contrast (Контрастность)», а затем .
3. Задайте настройку, используя или .
4. После завершения настроек выберите .

Примечание

- Когда установлен уровень контраста 100%, отображаются все градации цвета.
 - При регулировке монитора, рекомендуется выполнять регулировку яркости, при которой не потеряются характеристики градации, перед тем, как выполнить регулировку контраста.
 - Выполните регулировку контраста в следующих случаях.
 - Если яркость экрана слишком высока, даже когда установлен уровень яркости 0 %
-

● Регулировка цветовой температуры

Регулирует температуру цвета.

Температура цвета как правило используется для выражения оттенков «Белый» и/или «Черный» в численном значении. Значение выражается в градусах К (по Кельвину).

Экран становится красноватым при низкой температуре цвета и синеватым при высокой температуре цвета, похоже на температуру пламени. Предварительно настроенные значения усиления задаются для каждого значения цветовой температуры.

Диапазон настройки

Native, от 6000 К до 15000 К (с шагом в 100 К), sRGB

Порядок действий

1. В меню настроек выберите «CAL Switch Mode (режим CAL Switch)», затем выберите .
2. Выберите «Temperature», а затем .
3. Задайте настройку, используя или .
4. После завершения настроек выберите .

Примечание

- Функция «Усиление» позволяет выполнять более сложные регулировки (см. [«Регулировка усиления» \(стр. 16\)](#)).
 - Если выбрана установка «Native», изображение выводится с использованием предварительно отрегулированных параметров цветопередачи монитора (Усиление: 100 % для каждого канала RGB).
 - При изменении усиления значение цветовой температуры изменяется на «User».
-

● Регулировка гаммы.

Отрегулируйте гамму. Яркость монитора варьируется в зависимости от сигнала ввода, диапазон вариаций не пропорционален уровню входного сигнала. Поддержание баланса между сигналом ввода и яркостью монитора определяется как «Gamma correction».

Диапазон настройки

От 1,6 до 2,7, sRGB

Порядок действий

1. В меню настроек выберите «CAL Switch Mode (режим CAL Switch)», затем выберите .
2. Выберите «Gamma», а затем .
3. Задайте настройку, используя или .
4. После завершения настроек выберите .

Внимание

- Если для параметра «Hybrid Gamma PXL (Гибридная гамма на уровне пикселей)» установлено значение «On (Вкл.)», для пикселей цветного изображения фиксируется значение гаммы, подходящее для отображения цветного изображения (фиксированное), независимо от настройки.
-

● Регулировка оттенка

Отрегулируйте оттенок.

Диапазон настройки

От -100 до 100

Порядок действий

1. В меню настроек выберите «CAL Switch Mode (режим CAL Switch)», затем выберите .
2. Выберите «Hue», а затем .
3. Задайте настройку, используя или .
4. После завершения настроек выберите .

Внимание

- Использование этой функции может ограничить отображение некоторых градаций цвета.
-

● Регулировка насыщенности цвета

Отрегулируйте насыщенность цвета.

Диапазон настройки

От -100 до 100

Порядок действий

1. В меню настроек выберите «CAL Switch Mode (режим CAL Switch)», затем выберите .
2. Выберите «Saturation», а затем .
3. Задайте настройку, используя или .
4. После завершения настроек выберите .

Внимание

- Использование этой функции может ограничить отображение некоторых градаций цвета.
-

Примечание

- Минимальное значение (-100) меняет изображение на монохромное.
-

● Регулировка усиления

Яркость каждого из цветовых компонентов (красного, зеленого и синего) называется «усилением». Оттенок «белого» можно изменить с помощью регулировки усиления.

Диапазон настройки

От 0 до 100 %

Порядок действий

1. В меню настроек выберите «CAL Switch Mode (режим CAL Switch)», затем выберите .
2. Выберите «Gain (Усиление)», а затем .
3. Выберите цвет для регулировки: «Red», «Green» и «Blue», затем выберите .
4. Задайте настройку, используя или .
5. После завершения настроек выберите .


Внимание

- Использование этой функции может ограничить отображение некоторых градаций цвета.


Примечание

- Значение усиления меняется в зависимости от цветовой температуры.
 - При изменении усиления значение цветовой температуры изменяется на «User».
-

2-5. Отображение дополнительного окна

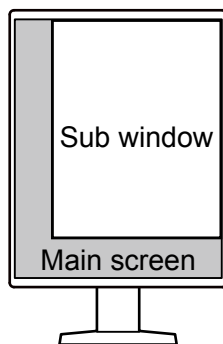

Примечание

- Если «PinP Display (Дисплей PinP)» задано для «DisplayPort 2» или «DVI», в подсказках для кнопок отобразится .
- Сигналы, которые могут быть отображены в дополнительном окне, отличаются в зависимости от сигналов, отображаемых на главном экране.

Сигналы на главном экране	Сигналы в дополнительном окне
DisplayPort 1	DisplayPort 2 / DVI
DisplayPort 2	DVI
DVI	-

- В дополнительном окне PinP поддерживаются перечисленные ниже разрешения. В дополнительном окне PinP изображения выводятся в 8-битном формате.

√: Поддерживается

Разрешение (Г × В)	Частота вертикальной развертки (Гц)	DisplayPort		DVI	
		Portrait (Вертикальная)	Landscape (Горизонтальная)	Portrait (Вертикальная)	Landscape (Горизонтальная)
720 × 400	70	√	√	√	√
640 × 480	60	√	√	√	√
800 × 600	60	√	√	√	√
1024 × 768	60	√	√	√	√
1280 × 1024	60	√	√	√	√
1600 × 1200	60	-	√	-	√
1200 × 1600	60	√	-	√	-
1920 × 1200	60	-	√	-	√
1200 × 1920	60	√	-	√	-

Внимание

- Дополнительное окно PinP недоступно в следующих ситуациях:
 - Отсутствует входной сигнал.
 - Подается неподдерживаемый входной сигнал.

● Настройка входного сигнала для дополнительного окна PinP

Выберите сигнал для отображения в дополнительном окне PinP.

Порядок действий

1. В меню настроек выберите «Preferences», затем выберите .
2. Выберите «PinP», а затем .
3. Выберите «PinP Display», а затем .
4. Выберите «Off (Выкл.)», «DisplayPort 2» или «DVI».
5. После завершения настроек выберите .

● Настройка режима отображения (CAL Switch Mode) для дополнительного окна PinP

Режим отображения дополнительного окна PinP можно настраивать.

Порядок действий

1. В меню настроек выберите «Preferences», затем выберите .
2. Выберите «PinP», а затем .
3. Выберите «CAL Switch Mode (режим CAL Switch)», а затем .
4. Выберите режим отображения, а затем .

Внимание

- Медицинские изображения должны воспроизводиться на главном экране PinP. Рекомендуем использовать дополнительное окно для отображения текста и т.п.
-

● Настройка положения отображения дополнительного окна PinP

Положение для отображения дополнительного окна PinP можно настроить.



Порядок действий

1. В меню настроек выберите «Preferences», затем выберите .
2. Выберите «PinP», а затем .
3. Выберите «Position», а затем .
4. Выберите «Upper Right», «Lower Right», «Lower Left» или «Upper Left», а затем .

● Отображение или скрытие дополнительного окна PinP

Предусмотрена возможность отображения или скрытия дополнительного окна PinP.

Порядок действий

1. Прикоснитесь к любой кнопке (кроме ).
2. Выберите  из подсказок для кнопок.
Дополнительное окно PinP будет отображаться или будет скрыто.




Примечание

- Используя RadiCS / RadiCS LE, можно отображать или скрывать дополнительное PinP проще, используя мышь или клавиатуру (Hide-and-Seek). Более подробные сведения приведены в руководстве пользователя RadiCS / RadiCS LE.
-

2-6. Включение или выключение восстановления резкости (функции коррекции четкости изображения)

Уникальная технология EIZO, называемая «восстановлением резкости», дает возможность воспроизведения изображений в точном соответствии с исходными данными источника путем с использованием коррекции вариаций ЖК-панели.

Порядок действий

1. Выберите , чтобы выключить монитор.
2. Касаясь крайней кнопки слева (), прикоснитесь к кнопке  и удерживайте ее не менее двух секунд, чтобы включить монитор.
3. Выберите «Sharpness Recovery» в меню «Administrator Settings», а затем выберите .
4. Выберите «On (Вкл.)» или «Off (Выкл.)», затем выберите .
5. Выбрать «Apply», затем нажать .

Внимание

- После изменения этой настройки выполните визуальную проверку согласно медицинским стандартам / указаниям.
-

Глава 3 Управление качеством монитора

Монитор оснащен встроенным передним датчиком, который дает возможность выполнения калибровки и проверки оттенков серого независимо.

Примечание

- Калибровку можно выполнять периодически, используя функцию планирования программного обеспечения RadiCS LE, которое прилагается к монитору. За дополнительными сведениями о процедуре настройки обратитесь к руководству пользователя RadiCS LE (находится на диске CD-ROM).
- RadiCS дает возможность задавать настройки расписания проверки оттенков серого, а также для калибровки. За дополнительными сведениями о процедуре настройки обратитесь к руководству пользователя RadiCS.
- Если вы хотите осуществлять контроль качества высокого уровня в соответствии с медицинскими стандартами / указаниями, используйте дополнительный набор программного обеспечения управления качеством «RadiCS UX1».
- Для согласования результатов измерений встроенного переднего датчика с результатами измерений внешнего датчика EIZO (датчика UX1 или UX2) выполняйте сопоставление данных встроенного переднего датчика и внешнего датчика с помощью программного обеспечения RadiCS / RadiCS LE. Периодическое выполнение сопоставления позволяет поддерживать точность измерений встроенного переднего датчика на одном уровне с точностью внешнего датчика.

3-1. Использование функции автокалибровки

Выполните автокалибровку и просмотрите последние результаты.

● Выполнение автокалибровки

Порядок действий


1. В меню настроек выберите «RadiCS SelfQC», затем выберите .
 2. Выберите установку «SelfCalibration» для «RadiCS SelfQC», а затем .
 3. Выберите «Execute», а затем .
- Выполняется автокалибровка.

Внимание

- Если в процессе автокалибровки выключается питание ПК или переключается входной сигнал, ее выполнение отменяется.
- После завершения автокалибровки выполните проверку оттенков серого при той же самой температуре в помещении и в тех же самых условиях освещения, которые ожидаются в реальной рабочей среде.

Примечание

- С помощью RadiCS / RadiCS LE можно задать настройки описанных ниже параметров. За дополнительными сведениями о процедурах настройки обратитесь к руководству пользователя RadiCS / RadiCS LE.
 - Целевые параметры калибровки
 - Расписание автокалибровки
 - Если вы задали расписание, используя RadiCS / RadiCS LE, то в расширенном меню отображается следующий запланированный сеанс выполнения.

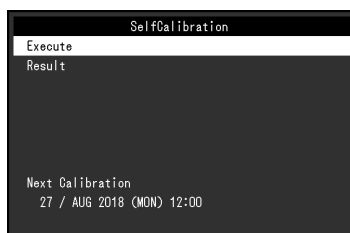

- Целевые параметры калибровки можно подтвердить, выбрав режим целевых параметров в разделе «CAL Switch Mode (режим CAL Switch)» меню настроек.

● Проверка результатов автокалибровки

Внимание

- Результаты можно проверить, если для параметра «QC History» задано значение «On» (см. «3-3. Настройка отображения / скрытия предупреждений или истории контроля качества» (стр. 22)).

Порядок действий

1. В меню настроек выберите «RadiCS SelfQC», затем выберите .
2. Выберите «SelfCalibration», а затем .
3. Выберите «Result», а затем .
4. Выберите «DICOM», «CAL1» или «CAL2», а затем .

Отображаются результаты автокалибровки (т.е. макс. частота ошибок, время выполнения последней операции и код ошибки).

3-2. Использование функции проверки оттенков серого

Выполните проверку оттенков серого и просмотрите последние результаты. Кроме того, если вы задали расписание, используя RadiCS, то в расширенном меню отображается следующий запланированный сеанс выполнения.

● Выполнение проверки оттенков серого

Внимание

- Выполняйте проверку оттенков серого для фактической цветовой температуры и яркости в рабочей среде.


Порядок действий

1. В меню настроек выберите «RadiCS SelfQC», затем выберите .
2. Выберите «Grayscale Check (Проверка оттенков серого)», а затем .
3. Выберите «Execute», а затем .

Проверка оттенков серого выполнена.

Внимание

- Определяющее значение для проверки оттенков серого можно задать в RadiCS. За более подробными сведениями обратитесь к руководству пользователя RadiCS.
- Используя RadiCS, можно задать расписание выполнения проверки оттенков серого. За дополнительными сведениями о процедуре настройки обратитесь к руководству пользователя RadiCS. Если вы задали расписание, используя RadiCS, то в расширенном меню отображается следующий запланированный сеанс выполнения.

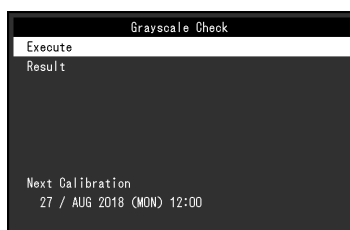

● Проверка результатов проверки оттенков серого

Внимание

- Результаты можно проверить, если для параметра «QC History» задано значение «On».

Порядок действий

1. В меню настроек выберите «RadiCS SelfQC», затем выберите .
2. Выберите «Grayscale Check (Проверка оттенков серого)», а затем .
3. Выберите «Result», а затем .
4. Выберите «DICOM», «CAL1» или «CAL2», а затем .
Отображается до пяти результатов проверки оттенков серого («Passed», «Failed», «Canceled» или «Error»).

3-3. Настойка отображения / скрытия предупреждений или истории контроля качества

Предупреждения, относящиеся к результатам проверки качества типа «Failed» (проверка не пройдена), или к результатам выполнения («QC History» – истории контроля качества) операций автокалибровки, проверки оттенков серого и т.д. можно настроить так, чтобы они отображались или были скрытыми.

Порядок действий

1. В меню настроек выберите «RadiCS SelfQC», затем выберите .
2. Выберите «Settings», а затем .
3. Выберите «Warning» или «QC History» с помощью.
4. Выберите «On» или «Off», а затем выберите .

Глава 4 Использование монитора в течение длительного периода времени

Монитор может быть настроен таким образом, чтобы переходить в режим энергосбережения в зависимости от состояния компьютера или при перемещении пользователя. Срок службы подсветки монитора можно увеличить, настроив переход монитора в режим энергосбережения, когда монитор не используется.

4-1. Настройка режима энергосбережения


Можно настроить переход монитора в режим энергосбережения в зависимости от состояния ПК.

Порядок действий

1. В меню настроек выберите «Preferences», затем выберите .
2. Выберите «Power Save», а затем .
3. Выберите «High (Высокое)», «Low (Низкое)» или «Off (Выкл.)», затем выберите .

Настройка	Функция
High	Подсветка выключается. Этим достигается наибольший энергосберегающий эффект.
Low	Подсветка переключается в режим минимальной яркости. Время, необходимое для восстановления нормальной работы после выхода из режима энергосбережения, может быть сокращено.
Off	Переход в режим энергосбережения не происходит. Подсветка работает всегда, независимо от состояния ПК. Эта установка может сократить срок службы подсветки.

Внимание

- Когда монитор не используется, можно полностью выключить питание, отключив монитор от электрической сети, например, вынув вилку из розетки.
- Устройства, подключенные к входному и выходному портам USB, продолжают работать, когда монитор находится в режиме энергосбережения, или когда питание монитора отключено с помощью кнопки питания () на нем. По этой причине энергопотребление монитора варьируется даже в режиме энергосбережения, в зависимости от подключенных устройств.
- Независимо от того, отображается ли дополнительное окно PinP, монитор может не переходить в режим энергосбережения, когда подается входной сигнал для дополнительного окна PinP.

Примечание

- Когда входной сигнал от ПК больше не обнаруживается, выводится сообщение, предупреждающее пользователя о переходе в режим энергосбережения. Монитор переходит в режим энергосбережения через пять секунд после появления этого сообщения.
- Когда для энергосбережения установлено значение «High (Высокое)» или «Low (Низкое)», узнать состояние монитора можно, проверив цвет светового индикатора на выключателе питания.

Индикатор питания	Состояние монитора	Состояние ПК
Зеленый	Нормальный рабочий режим	On (Вкл.)
Оранжевый	Режим энергосбережения	Off (Выкл.) или режим энергосбережения

4-2. Настройка перехода в режим энергосбережения при удалении пользователя

Настроив датчик присутствия, можно задать автоматический переход монитора в режим энергосбережения и отключение вывода изображения на экран, когда пользователь удаляется от монитора. Монитор выходит из режима энергосбережения, когда пользователь приближается к монитору. Продолжительность промежутка времени до перехода монитора в режим энергосбережения можно задать, исходя из условий работы монитора или режима перемещения пользователя.

Внимание

- Эта функция недоступна, когда выполняется операция «RadiCS SelfQC».
- Эта функция недоступна, когда для функции «Power Save» выбрана установка «Off».

Примечание

- Во время переключения в режим энергосбережения появится сообщение о том, что выполняется это переключение.

Порядок действий

1. В меню настроек выберите «Preferences», затем выберите .
2. Выберите «Presence Sensor (Датчик присутствия)», затем .
3. Выберите «Presence Sensor (Датчик присутствия)», затем .
4. Выберите «On (Вкл.)» или «Off (Выкл.)», затем выберите .
5. Если вы выбрали установку «On», задайте расширенные настройки.

Пункт	Диапазон настройки	Описание
Time	5, 30 sec 1, 3, 5, 10, 15, 30, 45, 60 min	Определяет продолжительность промежутка времени, который проходит до вывода сообщения «No presence detected.», после того как пользователь удалился от монитора. Если появляется это сообщение, монитор переходит в режим энергосбережения приблизительно через 20 секунд.
Sensitivity	Level 5 Level 4 Level 3 Level 2 Level 1	Чем большее значение установлено, тем больше чувствительность датчика, определяющего перемещение пользователя. Это затрудняет переход монитора в режим энергосбережения. С другой стороны, установка меньшего значения позволяет датчику определять только четко выраженные движения пользователя и тем самым облегчает переход монитора в режим энергосбережения. Датчик присутствия, установленный спереди монитора функционирует, определяя перемещение источника тепла. Чувствительность зависит от надетой на пользователя одежды и окружающей температуры. Если вы обнаружили, что переход в режим энергосбережения или выход из него происходят неожиданно, измените установку параметра.
Reset	-	Служит для сброса всех настроек, относящихся к датчику присутствия, с установкой значений по умолчанию.

Примечание

- Чувствительность снижается при повышении окружающей температуры. В этих условиях, для улучшения функционирования можно установить значение, соответствующее повышенной чувствительности. С другой стороны, чувствительность повышается при низких температурах, и соответственно требуется установить меньшее значение параметра.

Глава 5 Выбор настроек монитора

5-1. Выбор языка

Эта функция позволяет выбрать язык для меню настройки и сообщений.


Доступные языки

Английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, шведский, японский, китайский (упрощенное письмо), китайский (традиционное письмо)

Порядок действий

1. В меню настроек выберите «Languages», затем выберите .
2. Выберите язык, а затем .

5-2. Отображение значка для переключения портов USB в подсказках для кнопок

Предусмотрена возможность включения или выключения отображения значка  в подсказках для кнопок.

Порядок действий

1. В меню настроек выберите «Preferences», затем выберите .
2. Выберите «USB Selection», а затем .
3. Выберите «On (Вкл.)» или «Off (Выкл.)», затем выберите .


Если выбрана установка «On», то значок для переключения портов USB отображается в подсказках для кнопок.

Внимание

- Если выбрана установка «Off (Выкл.)», то будет выбран компьютер, подключенный в настоящее время к порту «USB 1», даже если выбран порт «USB 2».
-

5-3. Переключение между ПК, используемыми с устройствами USB

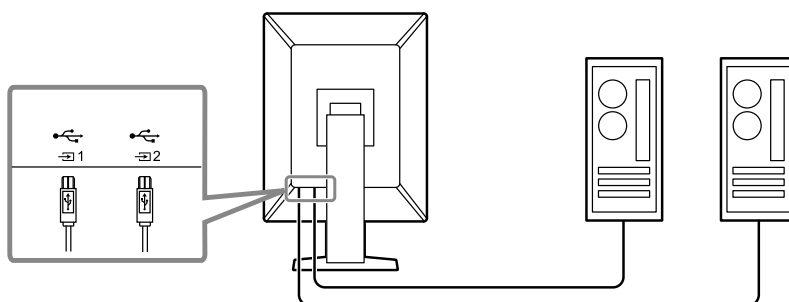

Выполняйте переключение между ПК, используемыми с устройствами USB.



Внимание

- Прежде чем менять настройку, отключите от монитора все накопители USB, если таковые подключены. В противном случае возможна потеря или повреждение данных.

Порядок действий

1. Прикоснитесь к любой кнопке (кроме ).
2. Выберите  из подсказок для кнопок.
3. Выберите «USB 1» или «USB 2», затем выберите .
Выберите входной порт USB, к которому подключен управляющий ПК.

5-4. Автоматическое определение входного сигнала

Данное изделие автоматически определяет разъем, через который подается сигнал, и выводит этот сигнал на экран.

Порядок действий

1. В меню настроек выберите «Preferences (Глобальные параметры)», затем выберите .
2. В меню «Preferences (Глобальные параметры)» выберите «Auto Input Detection (Автоматическое определение ввода)», затем выберите .
3. Выберите «On (Вкл.)» или «Off (Выкл.)», затем выберите .

Настройка	Функция
On (Вкл.)	Автоматическое определение разъема, через который подается сигнал, и вывод этого сигнал на экран. Если подключены несколько ПК, и ПК, с которого выводится отображаемый на экране сигнал, переходит в режим энергосбережения или выключается, автоматически отображается любой другой доступный сигнал.
Off (Выкл.)	Отображение выбранного входного сигнала, независимо от того, доступен ли он. Если вы хотите переключить входной сигнал, см. «2-2. Настройка входного сигнала» (стр. 10) .

Примечание


- Если выключить, а затем снова включить основное питание, происходит автоматическое определение входного сигнала, независимо от настройки.

5-5. Переключение размера изображения


Если изображение выводится с разрешением, отличным от рекомендованного, можно задать его размер.

Пример:


Full Screen (Полный экран)

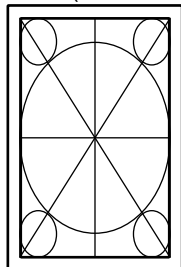

Aspect Ratio (Соотношение сторон)

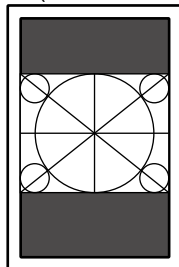

Dot by Dot (Точка за точкой)

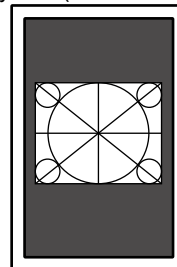

Порядок действий

1. В меню настроек выберите «Signal (Сигнал)», затем выберите .
2. Выберите «Picture Expansion (Растяжение изображения)», а затем – .
3. Выберите «Full Screen (Полный экран)», «Aspect Ratio (Соотношение сторон)» или «Dot by Dot (Точка за точкой)», затем выберите .

Настройка	Функция
Full Screen (Полный экран)	Увеличение изображения на полный экран. Однако, если изображение и экран имеют разное соотношение высоты и ширины, возможно искажение изображения.
Aspect Ratio (Соотношение сторон)	Увеличение изображения с сохранением соотношения его высоты и ширины. Однако, если изображение и экран имеют разное соотношение высоты и ширины, вдоль горизонтальных или вертикальных сторон экрана могут появляться области, в которых отсутствует изображение.
Dot by Dot (Точка за точкой)	Размер выводимого изображения зависит от его разрешения.




5-6. Установка версии DisplayPort 1

Возможна установка версии DisplayPort 1.

Внимание

- Для использования последовательного подключения установите версию «1.2».
- Если ПК подключен через разъем DisplayPort, версии DisplayPort могут различаться в зависимости от характеристик ПК, поэтому изображение на экране может отсутствовать. В этом случае попробуйте изменить указанные ниже настройки.




Порядок действий

1. Выберите , чтобы выключить монитор.
2. Касаясь крайней кнопки слева (), прикоснитесь к кнопке  и удерживайте ее не менее двух секунд, чтобы включить монитор.
3. В меню «Administrator Settings (Настройки администратора)» выберите «Signal Format (Формат сигнала)», затем выберите .
4. Выберите «DisplayPort 1», а затем .
5. Выберите «Version», а затем .
6. Выберите «1.1» или «1.2», затем выберите .
7. Выберите «Apply (Применить)», затем выберите .

5-7. Установка частоты обновления для сигнала DVI

Установите частоту обновления для сигнала DVI (частоту обновления экрана) в зависимости от окружающих условий.

Порядок действий

1. Выберите , чтобы выключить монитор.
2. Касаясь крайней кнопки слева (), прикоснитесь к кнопке  и удерживайте ее не менее двух секунд, чтобы включить монитор.
3. В меню «Administrator Settings (Настройки администратора)» выберите «Signal Format (Формат сигнала)», затем выберите .
4. Выберите «DVI», а затем – .
5. Выберите «Preferred Refresh Rate (Предпочтительная частота обновления)», а затем – .
6. Выберите «Low (Низкая)» или «High (Высокая)», затем выберите .




Настройка	Частота обновления
Low (Низкая)	46 Гц (для вертикальной ориентации), 47 Гц (для горизонтальной ориентации)
High (Высокая)	60 Гц

7. Выберите «Apply (Применить)», затем выберите .

5-8. Установка ориентации изображений при выводе

Эта функция дает возможность изменять ориентацию изображения при выводе в соответствии с ориентацией установки монитора.

Порядок действий

1. Выберите , чтобы выключить монитор.
2. Касаясь крайней кнопки слева (), прикоснитесь к кнопке  и удерживайте ее не менее двух секунд, чтобы включить монитор.
3. В меню «Administrator Settings (Настройки администратора)» выберите «Image Rotation (Поворот изображения)», затем выберите .
4. Выберите «Portrait (Вертикальная)» или «Landscape (Горизонтальная)», затем выберите .

Настройка	Ориентация монитора
Portrait (Вертикальная)	Выбирайте это значение, если монитор установлен в вертикальной ориентации.
Landscape (Горизонтальная)	Выбирайте это значение, если монитор установлен в горизонтальной ориентации.

5. Выберите «Apply (Применить)», затем выберите .



5-9. Регулировка яркости индикатора выключателя питания

Яркость индикатора выключателя питания (зеленый), который загорается при наличии изображения на экране, можно отрегулировать. Чем больше установленное значение, тем ярче светится индикатор питания. И наоборот – чем меньше значение, тем он будет темнее. Если выбрана установка «Off», индикатор выключателя питания не светится.

Диапазон настройки

От 1 до 7, Off

Порядок действий

1. В меню настроек выберите «Preferences», затем выберите .
2. Выберите «Indicator», а затем .
3. Задайте настройку, используя  или .
4. По завершении настройки выберите .

5-10. Пропуск неиспользуемых режимов отображения

Эта функция дает возможность пропуска некоторых режимов отображения при выборе режима. Используйте эту функцию, если вы хотите ограничить набор доступных для выбора режимов или избежать случайного изменения состояния экрана.

Порядок действий

1. В меню настроек выберите «Preferences», затем выберите .
2. Выберите «Mode Skip», а затем .
3. Выберите режим, настройку которого вы хотите изменить, затем выберите .
4. Выберите «Skip (Пропуск)» или «-», затем выберите .

Внимание

- Отключение (пропуск) некоторых режимов не допускается. Установите «-» хотя бы для одного режима.

5-11. Включение или выключение передачи данных через DisplayPort в режиме энергосбережения

При подключении ПК к разъему DisplayPort осуществляется передача данных, и таким образом потребляется значительная энергия даже в режиме энергосбережения. Передачу данных можно отключить установив для параметра «DP Power Save» значение «On». При этом снижается потребление энергии в режиме энергосбережения.

Внимание

- Если выбрана установка «On», то положение окон и значков может меняться при включении монитора или его выходе из режима энергосбережения. В этих случаях для данной функции необходимо выбрать «Off» (Выкл).




Порядок действий


1. Выберите , чтобы выключить монитор.
2. Касаясь крайней кнопки слева (), прикоснитесь к кнопке и удерживайте ее не менее двух секунд, чтобы включить монитор.
3. Выберите «DP Power Save» в меню «Administrator Settings», а затем выберите .
4. Выберите «On (Вкл.)» или «Off (Выкл.)», затем выберите .
5. Выбрать «Apply», затем нажать .

5-12. Блокировка кнопок управления

Выполнение регулировок или настроек можно заблокировать.

Порядок действий

1. Нажмите , чтобы выключить монитор.
2. Касаясь крайней кнопки слева (), прикоснитесь к кнопке  и удерживайте ее не менее двух секунд, чтобы включить монитор.
3. Выберите «Key Lock» в меню «Administrator Settings», а затем выберите .
4. Выберите «Off (Выкл.)», «Menu (Меню)» или «All (Все)», затем выберите .

Пункт настройки	Блокируемые кнопки
Off	Ни одного (Все переключатели включены.)
Menu	Регулировки или настройки с использованием меню настроек.
All	Все кнопки, за исключением 

5. Выбрать «Apply», затем нажать .

Примечание

- После выполнения калибровки с использованием RadiCS / RadiCS LE, выбирается установка «Menu».




5-13. Настройка отображения или скрытия предупреждения об ошибке отображения оттенков серого

При подаче сигнала DisplayPort с рекомендуемым разрешением можно настроить способ отображения сообщения об ошибке отображения оттенков серого, чтобы предупредить пользователя об обнаружении подачи 6-битного (64 оттенка серого) сигнала. При появлении сообщения об ошибке отключите основное питание, затем включите его снова.

Внимание

- Всегда использовать с опцией «ON» (значение по умолчанию «ON»).
- Включать опцию «OFF» только при использовании 6-битного (64 оттенка серого) сигнала.

Порядок действий

1. Выберите , чтобы выключить монитор.
2. Касаясь крайней кнопки слева (), прикоснитесь к кнопке  и удерживайте ее не менее двух секунд, чтобы включить монитор.
3. Выберите «Grayscale Warning» в меню «Administrator Settings», а затем выберите .
4. Выберите «On (Вкл.)» или «Off (Выкл.)», затем выберите .
5. Выбрать «Apply», затем нажать .

5-14. Получение данных по прогнозируемому сроку службы

Для оценки оставшегося срока службы монитора можно запросить соответствующие данные. Оценка срока службы основывается на получаемых данных, которые можно подтвердить, используя RadiCS / RadiCS LE.

Примечание

- Регистрация данных выполняется каждые 100 часов.
- Если выбрана установка «Power Save» и прошло 100 часов, то процесс сбора данных запускается при переходе в режим энергосбережения или при выключении питания.
- Если выбрана установка «Routine» или «Power Save», то встроенный передний датчик начитает измерение во время сбора данных. Если выбрана установка «Off», то встроенный передний датчик не выполняет измерения во время сбора данных.
- Собираемые данные сохраняются согласно следующему расписанию:
- 500, 1000, 2000, 4000, 7000, 10 000, 15 000, 20 000, 25 000 и 30 000 часов.




Порядок действий

1. В меню настроек выберите «RadiCS SelfQC», затем выберите .
2. Выберите установку «LEA» для «RadiCS SelfQC», а затем .
3. Выберите «Meas. Frequency».
4. Выберите «Power Save», «Routine» или «Off», затем выберите .

5-15. Настройка отображения или скрытия логотипа EIZO

Отображение логотипа EIZO при запуске монитора можно включить или выключить.

Порядок действий

1. Нажмите , чтобы выключить монитор.
2. Касаясь крайней кнопки слева (), прикоснитесь к кнопке  и удерживайте ее не менее двух секунд, чтобы включить монитор.
3. Выберите «On-Screen Logo» в меню «Administrator Settings», а затем выберите .
4. Выберите «On (Вкл.)» или «Off (Выкл.)», затем выберите .
5. Выбрать «Apply», затем нажать .

5-16. Просмотр информации о мониторе

Информацию, относящуюся к воспроизводимым в настоящий момент входным сигналам, и информацию о мониторе можно вывести на экран.


Порядок действий

1. В меню настроек выберите «Information», затем выберите .

Отображается информация о входном сигнале, наименование модели, серийный номер, версия встроенного программного обеспечения и общее время работы.

Инвентарный номер отображается только тогда, когда он был введен с использованием программного обеспечения RadiCS / RadiCS LE.

Пример:

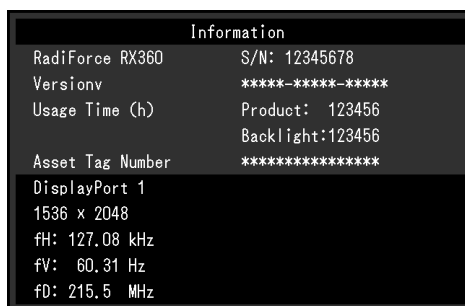

Information	
RadiForce RX360	S/N: 12345678
Versionv	****-****-****
Usage Time (h)	Product: 123456
	Backlight:123456
Asset Tag Number	*****
DisplayPort 1	
1536 x 2048	
fH: 127.08 kHz	
fV: 60.31 Hz	
fD: 215.5 MHz	

Внимание

- Общее время использования на момент приобретения может не равняться «0», поскольку перед поставкой с завода монитор проходил проверки и включался для других целей.
-

5-17. Сброс с установкой значений по умолчанию

Для сброса используются две различных функции: Первая функция выполняет сброс с установкой значений по умолчанию только настройки цветопередачи, а вторая – выполняет сброс всех настроек.

Внимание

- Предыдущие настройки нельзя восстановить после выполнения сброса с установкой значений по умолчанию.

Примечание

- Чтобы получить сведения о настройках по умолчанию, см. «7-3. Основные настройки по умолчанию» (стр. 43).

● **Сброс настроек цветопередачи**

Выполняется сброс с установкой значений по умолчанию только для параметров регулировки текущего режима.

Порядок действий

1. В меню настроек выберите «CAL Switch Mode (режим CAL Switch)», затем выберите .
2. Выберите «Reset», а затем .
3. Выберите «OK», а затем .

Параметры регулировки цветопередачи сбрасываются с установкой значений по умолчанию.

● **Сброс всех настроек**

Выполняется сброс всех настроек с установкой значений по умолчанию (за исключением «Input» и «Administrator Settings»).









Порядок действий


1. В меню настроек выберите «Preferences», затем выберите .
2. Выберите «Monitor Reset» для опции «Preferences», затем выберите .
3. Выберите «OK», а затем выберите .

Все настройки, за исключением «Input» и «Administrator Settings», сбрасываются с установкой значений по умолчанию.

Глава 6 Поиск и устранение неисправностей

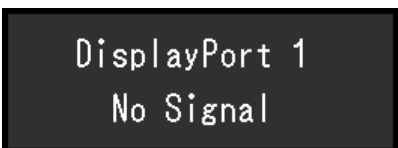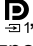6-1. Отсутствует изображение

Неисправность	Причина и действия по устранению
1. Отсутствует изображение <ul style="list-style-type: none">Индикатор питания не горит.	<ul style="list-style-type: none">Проверьте правильность подключения шнура питания.Включите выключатель основного питания.Нажать .Выключите, а затем снова включите основное питание.
<ul style="list-style-type: none">Индикатор питания горит: Зеленый	<ul style="list-style-type: none">Увеличьте значения «Brightness (Яркость)», «Contrast (Контрастность)», или «Gain (Усиление)» в меню настроек (см. «2-4. Регулировка яркости / цветопередачи» (стр. 12)).Выключите, а затем снова включите основное питание.
<ul style="list-style-type: none">Индикатор питания горит: Оранжевый	<ul style="list-style-type: none">Попробуйте переключить входной сигнал (см. «2-2. Настройка входного сигнала» (стр. 10)).Выполните какую-либо операцию с мышью или клавиатурой.Проверьте, включен ли ПК.Если включен датчик присутствия, возможно, монитор переключился в режим энергосбережения. Попробуйте переместиться ближе к монитору.Подключайте к  при выборе для входного сигнала «DisplayPort 1» и к  при выборе «DisplayPort 2». При настройке последовательного подключения  используется в качестве выхода.Выключите, а затем снова включите основное питание.
<ul style="list-style-type: none">Индикатор выключателя питания мигает: оранжевый, зеленый	<ul style="list-style-type: none">Подключите с использованием сигнальных кабелей, указанных компанией EIZO. Выключите, а затем снова включите основное питание.Если сигнальный кабель подключен к входу DisplayPort 1, попробуйте переключить версию DisplayPort (см. «5-6. Установка версии DisplayPort 1» (стр. 28)).
2. Отображается приведенное ниже сообщение. <ul style="list-style-type: none">Данное сообщение появляется при отсутствии входного сигнала. Пример: 	<p>Это сообщение появляется в случае некорректного входного сигнала, даже если монитор исправен.</p> <ul style="list-style-type: none">Сообщение, показанное слева, может появляться, поскольку некоторые компьютеры не сразу выводят сигналы после включения.Проверьте, включен ли ПК.Проверьте правильность подключения сигнального кабеля.Попробуйте переключить входной сигнал (см. «2-2. Настройка входного сигнала» (стр. 10)).Если сигнальный кабель подключен к входу DisplayPort, попробуйте переключить версию DisplayPort (см. «5-6. Установка версии DisplayPort 1» (стр. 28)).При выборе для входного сигнала DisplayPort значения «DisplayPort 1» подключайте к , а при выборе «DisplayPort 2» – к . При настройке последовательного подключения  используется в качестве выхода.Выключите, а затем снова включите основное питание.

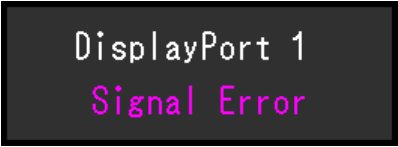Неисправность	Причина и действия по устранению
<ul style="list-style-type: none"> Данное сообщение указывает на то, что входной сигнал находится за пределами указанного частотного диапазона. (Частоты, находящиеся за пределами указанного в спецификациях частотного диапазона показаны фиолетовым.) Пример: 	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что ПК сконфигурирован в соответствии с требованиями к разрешению и частоте вертикальной развертки монитора (см. раздел «Поддерживаемые разрешения» в Инструкцию по эксплуатации). Перезагрузите ПК. Выберите требуемую настройку, используя служебную программу видеокарты. Более подробная информация содержится в руководстве пользователя графической карты.

6-2. Плохое изображение

Неисправность	Причина и действия по устранению
1. Экран слишком яркий или слишком темный.	<ul style="list-style-type: none"> Отрегулируйте параметр «Brightness (Яркость)» или «Contrast (Контрастность)» в меню настроек. (Лампа подсветки ЖК-монитора имеет ограниченный срок службы. Если экран потемнел или начала мерцать, следует обратиться к местному представителю компании EIZO).
2. Текст размыт	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что ПК сконфигурирован в соответствии с требованиями к разрешению и частоте вертикальной развертки монитора (см. раздел «Поддерживаемые разрешения» в Инструкцию по эксплуатации).
3. Появляются остаточные изображения	<ul style="list-style-type: none"> Остаточные изображения характерны для ЖК-мониторов. Избегайте вывода на экран одного и того же изображения в течение длительного времени. Используйте экранную заставку или функцию энергосбережения, чтобы одно и то же изображения не оставалось на экране в течение длительного времени. После вывода некоторых изображений в течение некоторого небольшого периода времени на экране может быть видно остаточное изображение. В этом случае решить проблему может помочь смена изображения или отключение питания на несколько часов.
4. На экране остаются зеленые / красные / синие / белые либо темные точки.	<ul style="list-style-type: none"> Это определяется свойствами ЖК-панели, а не из-за неполадок.
5. На экране могут оставаться интерференционные узоры или следы, появляющиеся при выборе панелей.	<ul style="list-style-type: none"> Выведите на весь экран белое или черное изображение. Помехи могут исчезнуть.

6-3. Другие неисправности

Неисправность	Причина и действия по устранению
1. Меню настроек не появляется.	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте, не активирована ли функция блокировки кнопок управления (см. «5-12. Блокировка кнопок управления» (стр. 31)).
2. Не открывается меню выбора режима.	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте, не активирована ли функция блокировки кнопок управления (см. «5-12. Блокировка кнопок управления» (стр. 31)).
3. Управляющие кнопки не работают.	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте, не активирована ли функция блокировки кнопок управления (см. «5-12. Блокировка кнопок управления» (стр. 31)).• Убедитесь, что на поверхности кнопки нет капель воды или загрязнений. Аккуратно протрите поверхность переключателей и попробуйте задействовать их еще раз сухими руками.• Вы в перчатках? Если да, снимите перчатки и попробуйте задействовать выключатели еще раз сухими руками.
4. (Когда используется датчик присутствия) Экран не выключается, даже когда пользователь удаляется от монитора, или экран не включается, даже когда пользователь приближается к монитору.	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте условия в месте установки монитора. Он может работать неправильно в перечисленных ниже условиях.<ul style="list-style-type: none">- Не подвергается ли монитор обдуву?- Нет ли вблизи монитора устройств, выделяющих тепло?- Нет ли перед монитором каких-либо препятствий?• Не загрязнен ли датчик? В этом случае удалите грязь мягкой тканью.• Сидите ли вы непосредственно перед монитором? Датчик присутствия, установленный спереди монитора функционирует, определяя перемещение источника тепла.• Монитор может не выходить из режима энергосбережения при слишком высокой температуре окружающей среды. Если монитор не включится повторно даже после перемещения мыши или нажатия на клавиши клавиатуры, необходимо выключить монитор, а затем снова включить его. Когда монитор вернется в рабочий режим измените чувствительность, увеличив значение параметра (см. «5-11. Включение или выключение передачи данных через DisplayPort в режиме энергосбережения» (стр. 30)).
5. Монитор не переходит в режим энергосбережения.	<ul style="list-style-type: none">• Независимо от того, отображается ли дополнительное окно PinP, монитор может не переходить в режим энергосбережения, когда подается входной сигнал для дополнительного окна PinP.

Неисправность	Причина и действия по устранению
<p>6. Монитор, подключенный с использованием кабеля USB, не определяется, или устройство USB (периферийное), которое подключено к монитору, не работает.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте, правильно ли подключен кабель USB (см. «7-2. Как пользоваться концентратором USB» (стр. 42)). • Попробуйте подключить устройство через другой порт USB ПК. • Попробуйте подключить устройство через другой порт USB монитора. • Перезагрузите ПК. • Попробуйте сменить ПК, используемый для работы с периферийным устройством (см. «5-3. Переключение между ПК, используемыми с устройствами USB» (стр. 26)). • Если периферийное устройство нормально работает при подключении непосредственно к компьютеру, свяжитесь с местным представителем компании EIZO. • Проверьте, поддерживают ли ПК и ОС стандарт USB. (Соответствие устройств протоколу USB можно уточнить у изготовителей). • При использовании Windows проверьте параметры USB в BIOS ПК. (За более подробными сведениями обратитесь к руководству ПК.)
<p>7. Во время работы выключилось питание, и экран не отображается.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Монитор автоматически выключился при чрезмерном повышении температуры внутренних компонентов. Если вы снова включите питание не остывшего монитора, он снова выключится через одну минуту. • Смените место установки или условия окружающей среды, подождите несколько минут и затем включите питание снова. <ul style="list-style-type: none"> - Не закрыты ли вентиляционные отверстия? - Нет ли вблизи монитора каких-нибудь горячих предметов? • Если питание не включается даже после смены места установки или условий окружающей среды, обратитесь к местному представителю EIZO. <p>Внимание</p> <ul style="list-style-type: none"> • Не загромождайте вентиляционные отверстия монитора и не используйте монитор в плохо вентилируемом месте.
<p>8. Встроенный передний датчик не срабатывает.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Выключите, а затем снова включите основное питание.
<p>9. Сбой автокалибровки / проверки оттенков серого.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Обратитесь к приведенной ниже таблице кодов ошибок. <p>Внимание</p> <ul style="list-style-type: none"> • Не прикасайтесь к встроенному переднему датчику.
<p>10. В истории автокалибровки / проверки оттенков серого некорректно отображается время.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Выполните поиск монитора с помощью RadiCS / RadiCS LE. За подробными сведениями обратитесь к руководству пользователя RadiCS / RadiCS LE.

● Таблица кодов ошибок

Код ошибки	Описание
****50	<ul style="list-style-type: none">• Максимальная яркость монитора может быть ниже целевой яркости.• Попробуйте снизить целевую яркость.
****52	<ul style="list-style-type: none">• Минимальная яркость монитора может быть выше целевой яркости.• Попробуйте увеличить целевую минимальную яркость.
****05	<ul style="list-style-type: none">• Возможно, датчик сработал неверно.• Выключите основное питание, подождите несколько минут и включите его снова, затем выполните автокалибровку / проверку оттенков серого еще раз.
****20 ****21	<ul style="list-style-type: none">• Возможно, датчик сработал неверно.• Проверьте, нет ли рядом с датчиком посторонних предметов.• Выполните автокалибровку / проверку оттенков серого еще раз.

Глава 7 Справочная информация

7-1. Процедура установки кронштейна

Сняв секцию стойки, можно прикрепить дополнительный кронштейн (или дополнительную стойку). Информация о поддерживаемых моделях дополнительного кронштейна (или дополнительной стойки) приведена на веб-сайте компании. <http://www.eizoglobal.com>

Внимание

- При установке кронштейна или стойки следуйте инструкциям из соответствующего руководства пользователя.
- При использовании кронштейна либо стойки другого производителя заранее уточните их параметры и выбирайте те изделия, которые соответствуют стандарту VESA.
 - Расстояние между отверстиями под винты: 100 мм × 100 мм
 - Внешние размеры крепления VESA для кронштейна или стойки: 122 мм x 122 мм или меньше
 - Прочность достаточная, чтобы удержать вес установленного монитора (кроме стойки) и присоединенных к нему компонентов, например, кабелей.
- При использовании кронштейна или стойки от другого производителя используйте указанные далее винты крепления.
 - Винты, соединяющие стойку с монитором
- При использовании кронштейна или стойки закрепляйте их так, чтобы обеспечить следующие углы наклона монитора.
 - Вверх на 45°, вниз на 45° (если монитор в вертикальной ориентации или повернут на 90° против часовой стрелки по отношению к горизонтальной ориентации)
- После установки стойки или кронштейна присоедините кабели.
- Не допускается перемещение снятой стойки вверх или вниз. Это может привести к травмированию персонала или повреждению устройства.
- Монитор, кронштейн и стойка имеют значительный вес. Их падение может привести к травмированию персонала или повреждению оборудования.
- Необходима регулярная проверка плотности затяжки винтов. В случае неплотной затяжки монитор может отсоединиться от кронштейна, что может привести к травмированию персонала или повреждению оборудования.

Процедура установки


1. Во избежание повреждений поверхности панели следует класть монитор на мягкой ткани, расстеленной на устойчивой поверхности, поверхностью панели вниз.

2. Снимите стойку.

Подготовьте отвертку. С помощью отвертки открутите винты (четыре), соединяющие устройство со стойкой.

3. Установите новый кронштейн или стойку на монитор.

Для крепления монитора к кронштейну (или стойке) используйте те же винты, которые были демонтированы на этапе 2.

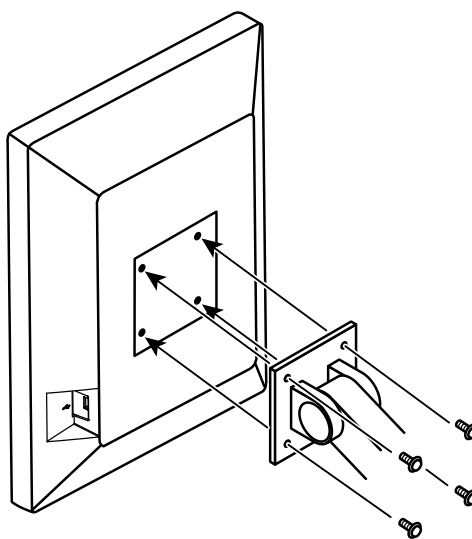


7-2. Как пользоваться концентратором USB


Этот монитор оснащен концентратором USB. При подключении к ПК, совместимому со стандартом USB, или к другому концентратору USB, этот монитор работает как концентратор USB, позволяя подключать периферийные устройства USB.

Процедура подключения


1. С помощью кабеля USB, входящего в комплект поставки, соедините выходной порт USB-совместимого ПК (или другой концентратор USB) и входной порт USB данного монитора.
2. Подключите устройство USB к выходному порту USB на мониторе.

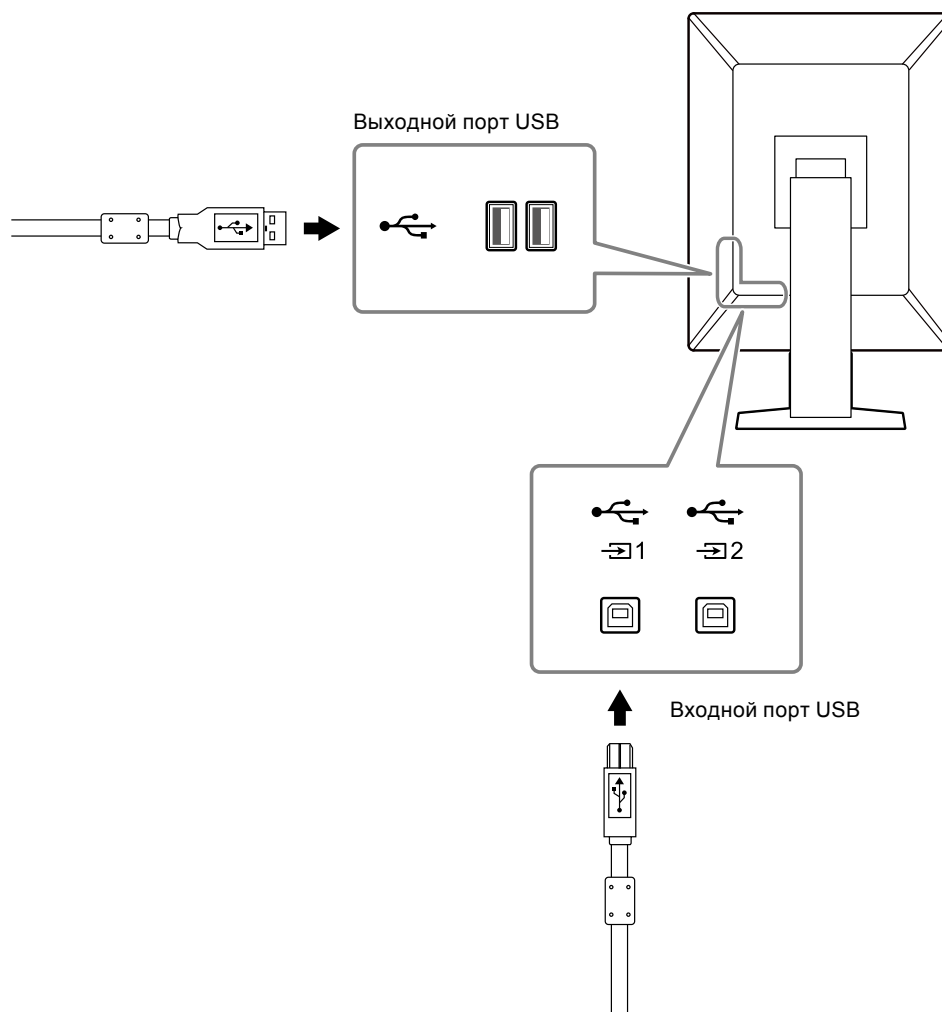

Внимание

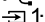- Если выключатель основного питания выключен, устройства, подключенные к выходному порту USB, не работают.
- Для выполнения контроля качества монитора подключайте ПК с установленным RadiCS / RadiCS LE к порту .

Примечание

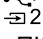
- При поставке порт  закрыт заглушкой. Для использования порта  удалите заглушку.
- По умолчанию, включена опция . Если вы хотите подключить два ПК и переключать их для работы с устройствами USB, см. «5-3. Переключение между ПК, используемыми с устройствами USB» (стр. 26).

7-3. Основные настройки по умолчанию

Режим CAL Switch: Заводской установкой режима отображения по умолчанию является «1-DICOM».

Режим	Яркость	Температура	Значение гаммы	Гибридная гамма на уровне пикселей
1-DICOM	500 кд/м ²	7500 К	DICOM GSDF	Off (Выкл.)
2-CAL1	400 кд/м ²	7500 К	2,2	Off (Выкл.)
3-CAL2	400 кд/м ²	7500 К	DICOM GSDF	Off (Выкл.)
4-Custom	Около 300 кд/м ²	7500 К	2,2	– (недоступно)
5-sRGB	Около 250 кд/м ²	sRGB	sRGB	– (недоступно)
6-Text	Около 100 кд/м ²	6500 К	2,2	– (недоступно)

Прочие

LEA		Power Save
Warning		Off
QC History		On
Picture Expansion		Dot by Dot (Точка за точкой)
Input		DisplayPort 1 ^{*1}
Auto Input Detection (Автоматическое определение ввода)		Off (Выкл.)
Power Save		High
Indicator		4
USB Selection		Off
PinP	PinP Display	Off ^{*1}
	CAL Switch Mode	DICOM
	Position	Upper Right
Presence Sensor (Датчик присутствия)		Off
	Time	10 min
	Sensitivity	Level 4
Mode Skip		- (отображаются все)
Language		English
On-Screen Logo		Off ^{*1}
Key Lock		Off ^{*1}
Image Rotation (Поворот изображения)		Portrait (Вертикальная) ^{*1}
DP Power Save		Off ^{*1}
Grayscale Warning		On ^{*1}
Sharpness Recovery		On ^{*1}
Signal Format (Формат сигнала)	DisplayPort 1	Version
	DVI	Preferred Refresh Rate (Предпочтительная частота обновления)
		1.2 ^{*1}
		Low (Низкая) ^{*1}
USB Selection ()		USB 1

*1 Эти меню нельзя инициализировать, выполнив операцию «Monitor Reset» (см. «Сброс всех настроек» (стр. 34)).

Приложение

Товарный знак

Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, а также логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing, LLC в Соединенных Штатах Америки и других странах.

Логотип DisplayPort Compliance и VESA – зарегистрированные товарные знаки ассоциации Video Electronics Standards Association.

Логотип SuperSpeed USB Trident — зарегистрированный товарный знак USB Implementers Forum, Inc.



Логотипы USB Power Delivery Trident – зарегистрированные товарные знаки USB Implementers Forum, Inc.



DICOM – зарегистрированный товарный знак Национальной ассоциации производителей электрооборудования для публикаций ее стандартов, касающихся обмена цифровой медицинской информацией.

Kensington и MicroSaver — зарегистрированные товарные знаки корпорации ACCO Brands.

Thunderbolt является зарегистрированным товарным знаком корпорации Intel в США и/или других странах.

Microsoft и Windows являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Майкрософт в США и других странах.

Adobe является зарегистрированным товарным знаком компании Adobe Systems Incorporated в США и других странах.

Apple, macOS, Mac OS, OS X, Macintosh и ColorSync являются зарегистрированными товарными знаками Apple Inc.

EIZO, EIZO Logo, ColorEdge, CuratOR, DuraVision, FlexScan, FORIS, RadiCS, RadiForce, RadiNET, Raptor и ScreenManager – зарегистрированные товарные знаки корпорации EIZO в Японии и других странах.

ColorEdge Tablet Controller, ColorNavigator, EcoView NET, EIZO EasyPIX, EIZO Monitor Configurator, EIZO ScreenSlicer, G-Ignition, i•Sound, Quick Color Match, RadiLight, Re/Vue, SafeGuard, Screen Administrator, Screen InStyle и UniColor Pro являются товарными знаками EIZO Corporation.

Все остальные названия компаний и продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками их владельцев.

Лицензия

Используемый для данного изделия растровый шрифт разработан компанией Ricoh Industrial Solutions Inc.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

EIZO Corporation (называемая в дальнейшем «EIZO») и авторизованные EIZO дистрибуторы (называемые в дальнейшем «Дистрибуторы») гарантируют, в соответствии с условиями и пунктами этой ограниченной гарантии (называемой в дальнейшем «Гарантия»), первичному покупателю (называемому в дальнейшем «Первоначальный покупатель»), который приобрел у EIZO или Дистрибуторов продукт, указанный в этом документе (называемый в дальнейшем «Продукт»), что EIZO или Дистрибуторы на свое усмотрение либо бесплатно отремонтируют, либо бесплатно заменят Продукт, если Первоначальный покупатель признает в пределах Гарантийного срока (определенного ниже), что (i) Продукт неисправен или он поврежден в процессе нормального использования Продукта в соответствии с описанием в инструкции по эксплуатации Продукта (называемой в дальнейшем «Руководство пользователя»), или что (ii) панель ЖКД и Яркость Продукта не в состоянии поддерживать рекомендованную яркость, указанную в Руководстве пользователя при условии нормального использования Продукта в соответствии с описанием в Руководстве пользователя. Гарантийный период ограничен сроком пять (5) года от даты приобретения Продукта (называемый в дальнейшем «Гарантийный период»). Однако яркость Продукта может быть гарантирована только, если Продукт использовался с рекомендованной яркостью, указанной в Руководстве Пользователя. Гарантийный период для яркости также ограничен сроком пять (5) лет от даты приобретения Продукта и время его использования не превышает 20 000 часов (для яркости 500 Кд/м² и цветовой температуры 7500 К) и не превышает 30 000 часов (для яркости 400 Кд/м² и цветовой температуры 7500 К). EIZO и Дистрибуторы не несут никакой ответственности и не берут обязательств относительно Продукта по отношению к Первоначальному покупателю или по отношению к любым третьим сторонам, кроме обязательств, оговоренных в этой Гарантии.

Компания EIZO и дистрибуторы прекращают поставку и хранение любых запчастей продукта (за исключением образцов для разработки) по истечении семи (7) лет после прекращения выпуска продукта. В случае ремонта монитора EIZO и Дистрибуторы будут использовать запчасти, которые соответствуют нашим стандартам QC (контроль качества). Если устройство невозможно отремонтировать из-за его состояния или отсутствия нужной детали, то вместо ремонта компания EIZO и ее дистрибуторы могут предлагать замену неисправного устройства на устройство с аналогичными характеристиками.

Гарантия действительна только в странах или регионах, где расположены Дистрибуторы. Гарантия не ограничивает никакие законные права Первоначального покупателя.

Несмотря на другие условия этой Гарантии EIZO и Дистрибуторы не несут никаких обязательств согласно этой Гарантии в любом из перечисленных ниже случаев:

- (а) Любые дефекты Продукта, вызванные повреждениями при перевозке, модификацией, изменением, неправильным обращением, неправильным использованием, авариями, неправильной установкой, стихийными бедствиями, прилипшей пылью, неправильным уходом и/или неправильным ремонтом третьей стороной, отличной от EIZO или Дистрибуторов;
- (б) Любые несовместимости Продукта из-за технических усовершенствований и/или изменения технических норм;
- (в) Любое повреждение датчика, включая ухудшение результатов измерения датчиком;
- (г) Любые дефекты Продукта, вызванные внешними устройствами;
- (д) Любые дефекты Продукта, вызванные использованием в условиях окружающей среды, отличных от предполагаемых EIZO и Дистрибуторами;
- (е) Любой износ комплектующих Продукта (например, кабелей, Руководство пользователя, диска CD-ROM и т.д.);
- (ж) Любой износ расходных частей и/или принадлежностей Продукта (например, батареек, пульта дистанционного управления, стилуса и т.д.);
- (з) Любые деформации, изменения цвета и/или коробления внешней поверхности продукта, включая поверхность панели ЖКД;
- (и) Любые дефекты Продукта, вызванные внешним оборудованием;
- (к) Любые дефекты Продукта, вызванные протеканием батарейки;
- (л) Любые ухудшения Продукта, вызванные использованием при яркости, повышенной по сравнению с рекомендованной яркостью, описанной в Руководстве пользователя;
- (м) Любое ухудшение качества изображения, вызванное устареванием изнашивающихся частей, таких как ЖК-панель и/или задняя подсветка и т. д. (например, изменение в равномерности яркости, изменения цветопередачи, цветовой однородности, дефекты пикселей, включая сгоревшие пиксели, и т. д.);
- (н) Любой износ или неисправности охлаждающего вентилятора, вызванные прилипшей пылью.

Чтобы получить техническое обслуживание в рамках Гарантии, Первоначальный покупатель должен доставить Продукт местному Дистрибутору, оплатив перевозку, в его оригинальной упаковке или в другой соответствующей упаковке, обеспечивающей равноценную степень защиты, принимая во внимание риск повреждения и/или утерю при транспортировке. При запросе технического обслуживания в рамках Гарантии Первоначальный покупатель должен предоставить свидетельство покупки продукта и даты покупки.

Гарантийный период для любого замененного и/или отремонтированного продукта в рамках Гарантии истекает в конце завершения срока действия оригинального Гарантийного периода.

EIZO ИЛИ ДИСТРИБУТОРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ УТЕРЮ ДАННЫХ ИЛИ ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, ХРАНИЩИХСЯ НА КАКИХ-ЛИБО НОСИТЕЛЯХ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ НА ЛЮБЫХ ДРУГИХ ЧАСТЯХ ПРОДУКТА, КОТОРЫЙ ВОЗВРАЩЕН EIZO ИЛИ ДИСТРИБУТОРАМ ДЛЯ РЕМОНТА.

EIZO И ДИСТРИБУТОРЫ НЕ ДАЮТ НИКАКОЙ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ГАРАНТИИ, ВЫРАЖЕННОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ, ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОДУКТА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК, ТОВАРНОСТИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ ДЛЯ КАКОГО-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ EIZO ИЛИ ДИСТРИБУТОРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ СЛУЧАЙНЫЙ, КОСВЕННЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ, ПОБОЧНЫЙ ИЛИ ИНОЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, УЩЕРБ ИЗ-ЗА НЕПОЛУЧЕННОЙ ПРИБЫЛИ, ПРЕРЫВАНИЯ БИЗНЕСА, ПОТЕРИ КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОТЕРИ), ВОЗНИКШИЙ ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОДУКТ ИЛИ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СВЯЗИ С ПРОДУКТОМ, ЛИБО ОСНОВАННЫЙ НА КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ, ГРАЖДАНСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, НЕБРЕЖНОСТИ, ПРИЧИНЕНИИ УЩЕРБА ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ ИЛИ ЧЕМ-ЛИБО ЕЩЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ EIZO ИЛИ ДИСТРИБУТОРЫ БЫЛИ УВЕДОМЛЕННЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. ЭТО ИСКЛЮЧЕНИЕ ТАКЖЕ ВКЛЮЧАЕТ ЛЮБЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРЕБОВАНИЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ В ОТНОШЕНИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЯ. СУЩЕСТВОМ ЭТОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ EIZO И ДИСТРИБУТОРОВ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ ИЗ-ЗА ЭТОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ И/ИЛИ ПРОДАЖ.

Сведения по утилизации

Recycling Information

This product, when disposed of, is supposed to be collected and recycled according to your country's legislation to reduce environmental burden. When you dispose of this product, please contact a distributor or an affiliate in your country.

The contact addressees are listed on the EIZO website below.

<http://www.eizoglobal.com>

For recycling information for customers in Switzerland, please refer to the following website.

<http://www.swico.ch>

Informationen zum Thema Recycling

Dieses Produkt muss gemäß den Vorschriften Ihres Landes zur Entlastung der Umwelt recyclet werden. Wenden Sie sich bei der Entsorgung dieses Produkts an einen Verteiler oder eine Tochtergesellschaft in Ihrem Land.

Die Adressen zur Kontaktaufnahme sind auf der unten angegebenen Website von EIZO aufgeführt.

<http://www.eizoglobal.com>

Kunden in der Schweiz entnehmen Informationen zum Recycling der folgenden Website:

<http://www.swico.ch>

Informations sur le recyclage

Ce produit doit être jeté aux points de collecte prévus à cet effet et recyclé conformément à la législation de votre pays, afin de réduire l'impact sur l'environnement. Lorsque vous jetez ce produit, veuillez contacter un distributeur ou une société affiliée de votre pays.

Les adresses des distributeurs sont répertoriées sur le site Web EIZO ci-dessous.

<http://www.eizoglobal.com>

Pour les clients en Suisse, veuillez consulter le site Web suivant afin d'obtenir des informations sur le recyclage.

<http://www.swico.ch>

Información sobre reciclaje

Este producto debe desecharse y reciclarse según la legislación del país para reducir el impacto medioambiental. Cuando desee deshacerse de este producto, póngase en contacto con un distribuidor o una filial de su país.

Encontrará las direcciones de contacto en el sitio web de EIZO que se indica a continuación.

<http://www.eizoglobal.com>

Informazioni sul riciclaggio

Per lo smaltimento e il riciclaggio del presente prodotto, attenersi alle normative vigenti nel proprio paese per ridurre l'impatto ambientale. Per lo smaltimento, rivolgersi ad un distributore o un affiliato presenti nel proprio paese.

Gli indirizzi sono elencati nel sito Web EIZO riportato di seguito.

<http://www.eizoglobal.com>

Per informazioni sul riciclaggio per i clienti in Svizzera, consultare il sito Web riportato di seguito.

<http://www.swico.ch>

Återvinningsinformation

När denna produkt kasseras ska den hanteras och återvinnas enligt landets föreskrifter för att reducera miljöpåverkan. När du kasserar produkten ska du kontakta en distributör eller representant i ditt land.

Kontaktadresserna listas på EIZO-webbplatsen nedan.

<http://www.eizoglobal.com>

Πληροφορίες ανακύκλωσης

Το προϊόν αυτό, όταν απορρίπτεται, πρέπει να συλλέγεται και να ανακυκλώνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας έτσι ώστε να μην επιβαρύνει το περιβάλλον. Για να απορρίψετε το προϊόν, επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο ή μια θυγατρική εταιρεία στη χώρα σας.

Οι διευθύνσεις επικοινωνίας αναγράφονται στην τοποθεσία web της EIZO παρακάτω.

<http://www.eizoglobal.com>

Сведения по утилизации

По истечении срока службы данного продукта его следует принести на сборный пункт и утилизировать в соответствии с действующими предписаниями в вашей стране, чтобы уменьшить вредное воздействие на окружающую среду. Прежде чем выбросить данный продукт, обратитесь к дистрибьютору или в местное представительство компании в вашей стране.

Контактные адреса можно найти на веб-узле EIZO.

<http://www.eizoglobal.com>

Informatie over recycling

Wanneer u dit product wilt weggooien, moet het uit milieu-overwegingen worden verzameld en gerecycled volgens de betreffende wetgeving van uw land. Wanneer u dit product wilt weggooien, moet u contact opnemen met een distributeur of een partner in uw land.

De contactadressen worden vermeld op de volgende EIZO-website.

<http://www.eizoglobal.com>

Informação sobre reciclagem

Este produto, quando o deitar fora, deve ser recolhido e reciclado de acordo com a legislação do seu país para reduzir a poluição. Quando deitar fora este produto, contacte um distribuidor ou uma filial no seu país.

Os endereços de contacto estão listados no website do EIZO, abaixo.

<http://www.eizoglobal.com>

Oplysninger om genbrug

Denne produkt forventes ved bortskaffelse at blive indsamlet og genbrugt i overensstemmelse med lovgivningen i dit land for at reducere belastningen af miljøet. Når du bortskaffer denne produkt, skal du kontakte en distributør eller et tilknyttet selskab i dit land.

Adresserne på kontaktpersonerne er angivet på EIZO's websted nedenfor.

<http://www.eizoglobal.com>

Kierrätystä koskevia tietoja

Tuote tulee hävittää kierrättämällä maan lainsäädännön mukaisesti ympäristön kuormittumisen vähentämiseksi. Kun hävität tuotteen, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai tytäryhtiöön maassasi.

Yhteystiedot löytyvät EIZOn Internet-sivustolta.

<http://www.eizoglobal.com>

Wykorzystanie surowców wtórnych

Ten produkt po zużyciu powinien być zbierany i przetwarzany zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Wyrzucając ten produkt, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub partnerem. Adresy kontaktowe można znaleźć we wskazanej poniżej witrynie internetowej firmy EIZO.

<http://www.eizoglobal.com>

Informace o recyklaci

Při likvidaci produktu musí být produkt vyzvednut a recyklován podle zákonů příslušné země, aby nedocházelo k zatěžování životního prostředí. Zbavujete-li se produktu, kontaktujte distributora nebo pobočku ve své zemi. Kontaktní adresy jsou uvedeny na následující webové stránce společnosti EIZO.

<http://www.eizoglobal.com>

Ringlussevõtu alane teave

Keskkonnakoormuse vähendamiseks tuleks kasutatud tooted kokku koguda ja võtta ringlusse vastavalt teie riigi seadustele. Kui kõrvaldate käesoleva toote, võtke palun ühendust turustaja või filiaaliga oma riigis.

Kontaktisikud on toodud EIZO veebilehel järgmisel aadressil:

<http://www.eizoglobal.com>

Újrahasznosítási információ

Jelen terméket, amikor eldobjuk, az illető ország törvényei alapján kell összegyűjteni és újrahasznosítani, hogy csökkentjük a környezet terhelését. Amikor ezt a terméket eldobja, kérjük lépjen kapcsolatba egy országon belüli forgalmazóval vagy társvállalkozással.

A kapcsolat címei az EIZO alábbi weboldalán található felsorolva:

<http://www.eizoglobal.com>

Podatki o recikliranju

Ob koncu uporabe odslužen izdelek izročite na zbirno mesto za recikliranje v skladu z okoljevarstveno zakonodajo vaše države. Prosimo, da se pri odstranjevanju izdelka obrnete na lokalnega distributerja ali podružnico.

Kontaktni naslovi so objavljeni na spodaj navedenih spletnih straneh EIZO:

<http://www.eizoglobal.com>

Informácie o recyklácii

Pri likvidácii musí byť tento výrobok recyklovaný v súlade s legislatívou vašej krajiny, aby sa znížilo zaťaženie životného prostredia. Keď sa chcete zbaviť tohto výrobku, kontaktujte prosím distribútora alebo pobočku vo vašej krajine.

Zoznam kontaktných adries je uvedený na nasledovnej webovej stránke firmy EIZO:

<http://www.eizoglobal.com>

Pārstrādes informācija

Utilizējot šo produktu, tā savākšana un pārstrāde veicama atbilstoši jūsu valsts likumdošanas prasībām attiecībā uz slodzes uz vidi samazināšanu. Lai veiktu šī produkta utilizāciju, sazinieties ar izplatītāju vai pārstāvniecību jūsu valstī. Kontaktadreses ir norādītas zemāk minētajā EIZO tīmekļa vietnē.

<http://www.eizoglobal.com>

Informacija apie gražinamąjį perdirbimą

Šalinant (išmetant) šiuos gaminius juos reikia surinkti ir perdirbti gražinamuoju būdu pagal jūsų šalies teisės aktus, siekiant sumažinti aplinkos teršimą. Kai reikia išmesti šį gaminį, kreipkitės į jūsų šalyje veikiančią gaminių pardavimo atstovybę arba jos filialą.

Kontaktiniai adresatai nurodyti EIZO interneto svetainėje.

<http://www.eizoglobal.com>

Информация относительно рециклиране

При изхвърлянето на този продукт се предлага събирането и рециклирането му съобразно законите на вашата страна за да се намали замърсяването на околната среда. Когато искате да се освободите от този продукт, моля свържете се с търговския му представител или със съответните органи отговарящи за това във вашата страна.

Данните за връзка с нас са описани на следния Интернет сайт на EIZO:

<http://www.eizoglobal.com>

Informație referitoare la reciclare

Acest produs, când debarasat, trebuie colectat și reciclat conform legislației țării respective ca să reducem sarcina mediului. Când se debarasează de acest produs, vă rugăm să contactați un distribuitor sau un afiliat al țării respective.

Adresele de contact le găsiți pe pagina de web al EIZO:

<http://www.eizoglobal.com>

معلومات عن اعادة التدوير

عند التخلص من هذا المنتج، من الضروري تجميعه واعادة تدويره وفقاً للقوانين المتبعة في بلدك لتقليل العبء المسلط على البيئة. عندما تتخلص من هذا المنتج، يرجى الاتصال بموزع أو طرف منتسب إليه في بلدك. عناوين الاتصال مدرجة في موقع ايزو EIZO ادناه على شبكة الانترنت.

<http://www.eizoglobal.com>

Gerı Dönüşüm Bilgisi

Bu ürünün, atılacağı zaman, ülkenizin çevre kirliliğinin azaltılması konusundaki mevzuatına göre toplanması ve yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Ürünü atacağınız zaman lütfen ülkenizdeki bir distribütör veya ilgili kuruluşla temasa geçiniz.

İrtibat adresleri aşağıdaki EIZO web sitesinde verilmiştir.

<http://www.eizoglobal.com>

