



Upute za upotrebu

RadiForce® RX370

LCD monitor u boji

Važno

Pročitajte pažljivo ove "Upute za upotrebu" i "Priručnik za instalaciju" (zasebno) kako bi se upoznali sa sigurnom i učinkovitom upotreбom.

-
- Za prilagodbu i postavke monitora pogledajte "Priručnik za instalaciju".
 - Za najnovije informacije o proizvodu uključujući "Upute za upotrebu", pogledajte našu web-stranicu:
www.eizoglobal.com
-

SIGURNOSNI SIMBOLI

U ovom se priručniku i proizvodu koriste ispod navedeni sigurnosni simboli. Oni ukazuju na važne informacije. Pažljivo ih pročitajte.

	Nepridržavanje informacija označenih kao UPOZORENJE može imati za posljedicu ozbiljne ozljede i ugroziti život.
	Nepridržavanje informacija označenih kao OPREZ može dovesti do umjerenih ozljeda i/ili oštećenja imovine ili proizvoda.
	Označava upozorenje ili oprez. Na primjer,  označava opasnost od strujnog udara.
	Ukazuje na zabranjenu radnju. Na primjer,  znači "Zabranjeno rastavljanje".

Ovaj je proizvod posebno prilagođen za korištenje na području u kojem je izvorno isporučen. Ako se proizvod koristi izvan tog područja, možda neće raditi kako je navedeno u specifikacijama.

Nijedan dio ovog priručnika ne smije se reproducirati, čuvati u sustavu za dohvaćanje podataka ili prenositi u bilo kojem obliku ili bilo kojim sredstvima, mehaničkim ili drugim, bez prethodnog pisanog odobrenja korporacije EIZO.


Korporacija EIZO nema obvezu čuvanja povjerljivosti bilo kojeg dostavljenog materijala ili informacije, osim ako tako nije dogovoreno pri prijemu takvih informacija od korporacije EIZO. Premda smo poduzeli sve kako bismo osigurali da ovaj priručnik pruža ažurne informacije, napominjemo da se specifikacije proizvida tvrtke EIZO mogu mijenjati bez prethodne obavijesti.

MJERE OPREZA

VAŽNO

- Ovaj je proizvod posebno prilagođen za korištenje na području u kojem je izvorno isporučen. Ako se ovaj proizvod koristi izvan tog područja, možda neće raditi kako je navedeno u specifikacijama.
- Pažljivo pročitajte ovaj odlomak i izjave koje se odnose na mjere opreza na monitoru radi osobne zaštite i pravilnog održavanja.

Mjesto gdje su navedene mjere opreza

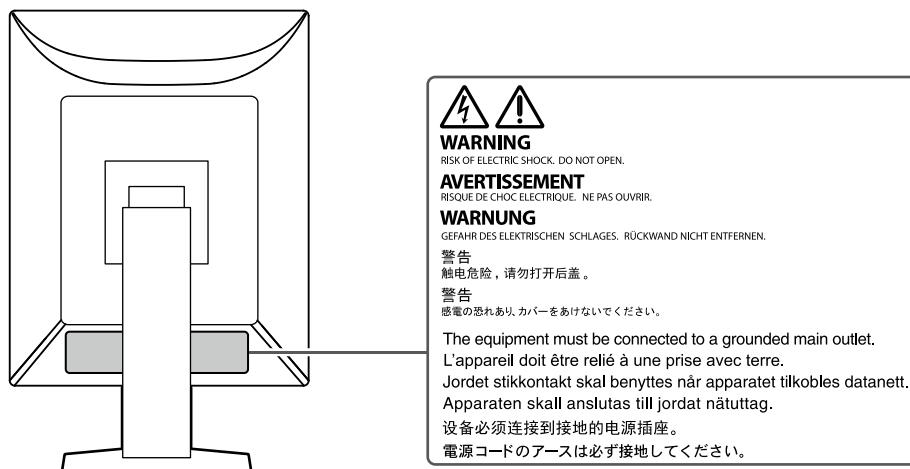

Simboli na jedinici

Simbol	Ovaj simbol označava
○	Glavna sklopka mrežnog napajanja: Pritisnite da biste isključili mrežno napajanje monitora.
— —	Glavna sklopka mrežnog napajanja: Pritisnite da biste uključili mrežno napajanje monitora.
⊕	Gumb napajanja: Pritisnite da biste uključili ili isključili napajanje monitora.
~	Izmjenična struja
⚡	Upozorava na električnu opasnost
!	OPREZ: Proučite „ SIGURNOSNI SIMBOLI “ (stranica 2).
☒	WEEE oznaka: Proizvod se mora odložiti odvojeno; materijali se mogu reciklirati.
CE	CE oznaka: Oznaka sukladnosti s propisima EU-a u skladu s odredbama Direktive Vijeća i/ili Uredbe (EU).
🏭	Proizvođač
☰	Datum proizvodnje
RXonly	Oprez: Savezni zakon (SAD) ograničava prodaju ovog uređaja od strane ili po narudžbi ovlaštenog zdravstvenog djelatnika.
EU Medical Device	Medicinski uređaj u EU
EU Importer	Uvoznik za EU



UPOZORENJE

Ako se iz jedinice počne širiti dim, ako miriše kao da nešto gori ili ako se čuje čudna buka, odmah isključite sve priključke za napajanje i za savjet se обратите zastupniku tvrtke EIZO.

Pokušate li koristiti pokvarenu jedinicu može doći do požara, strujnog udara ili oštećenja opreme.



Nemojte rastavljati jedinicu ni izvoditi preinake na njoj.

Otvaranje ormarića ili vršenje preinaka na jedinici može dovesti do požara, strujnog udara i oštećenja opreme.

Prepuštite svako servisiranje kvalificiranom servisnom osoblju.

Nemojte pokušavati sami servisirati proizvod jer otvaranje ili uklanjanje poklopaca može dovesti do požara, strujnog udara ili oštećenja opreme.



Držite sitne predmete ili tekućinu dalje od jedinice.

Sitni predmeti mogu slučajno upasti kroz ventilacijske otvore u ormarić i tekućina se može izliti u ormarić što može za posljedicu imati požar, strujni udar ili oštećenje opreme. Ako neki predmet upadne u ormarić/izlije se tekućina, odmah isključite jedinicu iz napajanja. Prije ponovnog korištenja jedinicu treba provjeriti kvalificirani servisni inženjer.

Postavite jedinicu na čvrsto i stabilno mjesto.

Jedinica koja nije na odgovarajućoj podlozi može pasti, što može dovesti do ozljede ili oštećenja opreme.

Ako jedinica padne, odmah isključite napajanje i potražite savjet od lokalnog zastupnika tvrtke EIZO.

Nemojte upotrebljavati oštećenu jedinicu. Upotreba oštećene jedinice može rezultirati požarom ili strujnim udarom.



Koristite jedinicu na odgovarajućem mjestu.

U protivnom može nastati požar, strujni udar ili oštećenje opreme.

- Jedinicu nemojte držati vani.
- Jedinicu nemojte držati u prijevoznim sredstvima (brodovima, zrakoplovima, vlakovima, automobilima i slično).
- Jedinicu nemojte držati u prašnjavoj ili vlažnoj okolini.
- Jedinicu nemojte držati na mjestima gdje voda može poprskati zaslon (kupaonica, kuhinja i slično).
- Jedinicu nemojte držati na mjestima gdje dolazi u izravan dodir sa zaslonom.
- Jedinicu nemojte držati u blizini uređaja koji proizvode toplinu ni u blizini ovlaživača zraka.
- Jedinicu nemojte držati na mjestima gdje je izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Jedinicu nemojte držati u okolini sa zapaljivim plinom.
- Proizvod nemojte stavlјati u okoline s korozivnim plinovima (kao što je sumporov dioksid, sumporovodik, dušikov dioksid, klor, amonijak i ozon)
- Proizvod nemojte stavlјati u okoline s prašinom, komponentama koje ubrzavaju koroziju u atmosferi (kao što su natrijev klorid i sumpor), vodljivim metalima i sličnim

Da biste izbjegli opasnost od gušenja, držite plastične vrećice za pakiranje izvan dohvata beba i djece.


Rabite priloženi kabel napajanja i spojite ga u standardnu strujnu utičnicu u svojoj zemlji.

Pridržavajte se nazivnog napona kabela napajanja. U protivnom može nastati požar ili strujni udar.

Napajanje: 100 - 240 Vac 50 / 60 Hz



OK

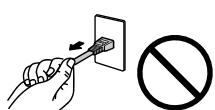

Da biste odspojili kabel napajanja čvrsto uhvatite utikač i povucite.

Potezanje kabela može dovesti do požara ili strujnog udara.





UPOZORENJE

Koristite ispravan napon.

- Jedinica je namijenjena za upotrebu isključivo pri određenom naponu. Spajanje na napon različit od onog navedenom u ovim "Uputama za upotrebu" može prouzročiti požar, strujni udar i oštećenje opreme.
Napajanje: 100 - 240 Vac 50 / 60 Hz
- Nemojte preopterećivati strujni krug jer to može dovesti do požara ili strujnog udara.

Kabelom napajanja rukujte pažljivo.

- Ne postavljanje kabel ispod jedinice ili drugih teških predmeta.
- Nemojte vući ili vezati kabel.

Ako se kabel ošteti, prestanite ga koristiti. Korištenje oštećenog kabela može dovesti do požara ili strujnog udara.



Operater ne smije dodirnuti pacijenta dok dira proizvod.

Ovaj proizvod nije namijenjen da ga diraju pacijenti.



Nikada nemojte dodirivati utikač i kabel napajanja ako počne grmjeti.

Dodirivanje može dovesti do strujnog udara.



Pri pričvršćivanju stalaka s krakom pridržavajte se korisničkog priručnika za stalak s krakom i instalirajte jedinicu na siguran način.

U suprotnom bi se jedinica mogla odvojiti, što može dovesti do ozljede i/ili oštećenja opreme. Prije instalacije provjerite imaju li stolovi, zidovi i ostale površine na koje se monitor postavlja odgovarajuću mehaničku snagu. Ako jedinica padne, potražite savjet od lokalnog predstavnika tvrtke EIZO. Nemojte upotrebljavati oštećenu jedinicu. Upotreba oštećene jedinice može rezultirati požarom ili strujnim udarom. Pri ponovnom pričvršćivanju stalaka s nagibom koristite iste vijke i čvrsto ih zategnite.

Oštećenu LCD ploču nemojte dirati golim rukama.

Tekući kristali su otrovni. Ako bilo koji dio vaše kože dođe u izravan dodir s pločom, dobro ga isperite. Ako vam tekući kristali uđu u oči ili usta, odmah ih isperite velikom količinom vode i potražite liječničku pomoć.



OPREZ


Jedinicu pažljivo prenosite.

Pri premještanju jedinice odspojite kabel napajanja i druge kable. Premještanje jedinice s priključenim kabelom napajanja ili drugim kabelima opasno je i može rezultirati ozljedama.

Jedinicu nosite ili je postavite u skladu s navedenim ispravnim načinima.

- Prilikom pomicanja proizvoda čvrsto držite dno monitora.
- Monitori veličine 30 inča i više su teški. Prilikom raspakiravanja i/ili prijenosa monitora, pobrinite se da budu uključene barem 2 osobe.
- Ako vaš model uređaja ima ručku na stražnjoj strani monitora, uhvatite i čvrsto držite dno i ručku monitora.

Ispuštanje jedinice može dovesti do ozljede ili oštećenja opreme.

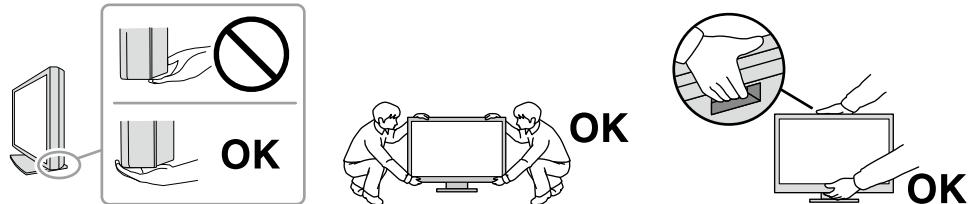

Nemojte zaklanjati ventilacijske otvore na ormariću.

- Na ventilacijske otvore ne postavljajte nikakve predmete.
- Nemojte instalirati jedinicu na mjesto sa slabom ventilacijom ili premalo prostora.
- Jedinicu nemojte koristiti položenu ili okrenutu naopako.

Zaklanjanje ventilacijskih otvora sprječava pravilan protok zraka i može dovesti do požara, strujnog udara ili oštećenja opreme.



Utikač nemojte dodirivati vlažnim rukama.

Inače može doći do strujnog udara.



Koristite pristupačnu strujnu utičnicu.

Tako ćete moći isključiti napajanje u slučaju problema.

Redovito čistite područje oko utikača i ventilacijskog otvora monitora.

Prašina, voda ili ulje na utikaču mogu dovesti do požara.

Prije čišćenja isključite jedinicu iz napajanja.

Čišćenje jedinice dok je priključena u strujnu utičnicu može dovesti do strujnog udara.

Ako jedinicu ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, nakon isključivanja sklopke napajanja isključite kabel napajanja iz zidne utičnice radi sigurnosti i uštede energije.

Odložite ovaj proizvod u skladu s lokalnim ili nacionalnim zakonima države u kojoj se nalazite.

Za korisnike na području EGP-a i Švicarske:

Svaki ozbiljni incident u vezi s uređajem treba se prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj se korisnik i/ili pacijent nalazi.

Obavijesti uz ovaj proizvod

Indikacije za upotrebu

Proizvod je namijenjen za prikazivanje radioloških slika koje osposobljenim medicinskim stručnjacima služe za pregled, analizu i postavljanje dijagnoze. Prikazivanje nije namijenjeno za mamografiju.

Pažnja

- Proizvod možda neće imati važeće jamstvo za bilo koje druge upotrebe osim onih opisanih u ovom priručniku.
- Specifikacije navedene u ovom priručniku primjenjuju se samo kada se koristi sljedeće:
 - Kabeli napajanja isporučeni uz proizvod
 - Navedeni signalni kabeli
- Uz ovaj proizvod koristite samo one dodatne proizvode koje smo mi proizveli ili naveli.

Mjere opreza za uporabu

- Dijelovi (poput LCD panela) mogu se pokvariti uslijed dugotrajnih razdoblja uporabe. Redovito provjeravajte funkcioniraju li normalno.
- Kad se slika na zaslonu promjeni nakon što se dulje vrijeme prikazivala ista slika, slika može ostati u pozadini. Koristite čuvan zaslona ili funkciju uštete energije da biste izbjegli prikazivanje iste slike tijekom duljeg vremenskog razdoblja. Ovisno o slici, može se pojaviti pozadinska slika čak i ako je prikazana tijekom kraćeg vremenskog razdoblja. Da biste uklonili takvu pojavu, promjenite sliku ili pričekajte da napajanje ostane isključeno nekoliko sati.
- Potrebno je oko nekoliko minuta da se stabilizira zaslon monitora. Prije upotrebe monitora pričekajte nekoliko minuta ili dulje nakon što ste uključili monitor ili ga ponovno aktivirali iz štednog načina rada.
- Ako monitor radi neprekidno tijekom dugog razdoblja, mogu se pojaviti mrlje ili se slika može trajno zadržati. Da biste maksimalno produljili vijek trajanja monitora, preporučujemo da redovito isključujete monitor.
- Pozadinsko svjetlo LCD ploče ima ograničen vijek trajanja. Ovisno o uzroku korištenja, takvo korištenje tijekom dugih neprekidnih razdoblja može prouzročiti da se pozadinsko svjetlo ranije istroši i da je potrebna njegova zamjena. Ako se zaslon zatajni ili počne treperiti, kontaktirajte lokalnog zastupnika tvrtke EIZO.
- Na zaslonu se mogu prikazati oštećeni pikseli ili mali broj svijetlih točaka. Razlog tomu su karakteristike same ploče, a ne kvar proizvoda.
- LCD ploču ili rubove okvira nemojte čvrsto pritiskati jer to može dovesti do neispravnog prikaza, poput uzoraka interferencije itd. Ako se na površinu LCD ploče stalno primjenjuje pritisak, može doći do oštećenja tekućih kristala ili LCD ploče. (Ako na ploči ostanu tragovi pritiska, ostavite monitor neko vrijeme s crnim ili bijelim zaslonom. Simptom će možda nestati).
- LCD ploču nemojte grebatи ni pritiskati oštре predmete uz nju jer to može dovesti do oštećenja LCD ploče. Nemojte brisati ploču papirnatim maramicama jer to može ostaviti ogrebotine na ploči.
- Nemojte dodirivati ugrađeni kalibracijski senzor (integrirani prednji senzor). Tako možete smanjiti točnost mjerenja ili oštetiti opremu.
- U zavisnosti od okruženja, vrijednost koju izmjeri ugrađeni senzor osvjetljenja može se razlikovati od vrijednosti prikazane na samostalnom mjeraču osvjetljenja.
- Ako je proizvod hladan pa se unese u prostoriju ili sobna temperatura naglo poraste, na unutarnjim i vanjskim površinama proizvoda može se pojaviti kondenzacija. U tom slučaju nemojte uključivati proizvod. Pričekajte da kondenzacija nestane jer u protivnom može doći do oštećenja proizvoda.

Da bi monitor dugo radio

● Kontrola kvalitete

- Na kvalitetu zaslona monitora utječe razina kvalitete ulaznih signala i degradacija proizvoda. Obavljajte vizualne provjere i testove periodične konstantnosti kako bi se bilo sukladno s medicinskim standardima/smjernicama prema vašoj primjeni te obavljajte kalibraciju po potrebi. Upotreba softvera kontrole kvalitete monitora RadiCS omogućava vam provedbu kontrole kvalitete na visokoj razini koja ispunjava medicinske standarde/smjernice.
- Potrebno je oko 15 minuta (u našim uvjetima mjerena) da se stabilizira prikaz na monitoru. Nakon uključivanja monitora ili ponovnog aktiviranja monitora iz štednog načina rada pričekajte 15 minuta ili dulje pa tek onda provedite različita ispitivanja kontrole kvalitete, kalibraciju ili podešavanje zaslona monitora.
- Preporučujemo da monitore namjestite na preporučenu ili nižu svjetlinu da bi se smanjile promjene u osvjetljenju koje prouzrokuje dugoročna uporaba i da bi se zadržala stabilna svjetlina.
- Kako biste prilagodili rezultate mjerena integriranog kalibracijskog senzora (integrirani prednji senzor) rezultatima vanjskog senzora EIZO (senzor UX2) koji se prodaje odvojeno, izvedite korelaciju između integriranog prednjeg senzora i vanjskog senzora uporabom softvera RadiCS / RadiCS LE. Periodička korelacija omogućuje vam održavanje točnosti mjerena integriranog prednjeg senzora na razini koja je jednaka onoj vanjskog senzora.

Pažnja

- Status zaslona monitora može se neočekivano promijeniti zbog pogreške u radu ili neočekivane promjene postavke. Nakon podešavanja zaslona monitora preporučuje se da monitor upotrebljavate sa zaključanim kontrolnim gumbima. Pojedinosti o postavljanju potražite u Priručniku za instalaciju (na CD-ROM-u).

● Čišćenje

Preporučuje se povremeno čišćenje da bi se održao nov izgled proizvoda i produljio njegov radni vijek.

Pažljivo obrišite prljavštinu s površine ormara ili ploče mekom krpicom natopljenom malom količinom vode ili jednom od kemijskih otopina navedenih u nastavku ili sredstvom ScreenCleaner (dostupno kao opcija).

Kemijska sredstva koja se mogu upotrebljavati za čišćenje

Naziv materijala	Naziv proizvoda
Etanol	Etanol
Izopropilni alkohol	Izopropilni alkohol
Benzalkonijev klorid	Welpas
Glutaral	Sterihyde
Glutaral	Cidex Plus28

Pažnja

- Ne upotrebljavajte često kemijska sredstva. Kemijska sredstva poput alkohola ili antiseptičkih sredstava mogu prouzročiti promjene u sjaju premaza uređaja, gubljenje ili blijeđenje boje ormarića ili ploče te pogoršanje kvalitete slike.
- Za čišćenje nikada nemojte koristiti razrjeđivač, benzen, vosak ili abrazivno sredstvo koji mogu oštetiti ormarić ili ploču.
- Pazite da kemijska sredstva ne dođu u izravan kontakt s monitorom.

Za ugodno korištenje monitora

- Dugotrajno gledanje u monitor zamara oči. Napravite stanku od 10-ak minuta svakih sat vremena.
- Gledajte u zaslon s odgovarajuće udaljenosti i pod odgovarajućim kutom.

Upozorenja i odgovornost u vezi s kibernetičkom sigurnošću

- Ažuriranje firmvera treba sprovesti uz nadzor tvrtke EIZO Corporation ili njezinog zastupnika.
- Ako EIZO Corporation ili njezin zastupnik savjetuju da ažurirate firmver, učinite to odmah.

SADRŽAJ

MJERE OPREZA.....	3
VAŽNO	3
Obavijesti uz ovaj proizvod.....	7
Indikacije za upotrebu	7
Mjere opreza za uporabu.....	7
Da bi monitor dugo radio	8
● Kontrola kvalitete.....	8
● Čišćenje	8
Za ugodno korištenje monitora.....	8
Upozorenja i odgovornost u vezi s kibernetičkom sigurnošću.....	9
SADRŽAJ	10
Poglavlje 1 Uvod	11
1-1. Značajke	11
1-2. Sadržaj pakiranja	13
● Disk s uslužnim programima za LCD monitor tvrtke EIZO	14
1-3. Upravljanje i funkcije	15
Poglavlje 2 Ugradnja / Spajanje	16
2-1. Prije ugradnje proizvoda.....	16
● Zahtjevi za ugradnju.....	16
2-2. Spajanje kabela.....	17
2-3. Uključivanje napajanja	20
2-4. Brzo punjenje USB-om tipa C	20
2-5. Prilagodba visine i kuta zaslona	21
Poglavlje 3 Nema slike	22
Poglavlje 4 Specifikacije	23
4-1. Popis specifikacija.....	23
4-2. Kompatibilne razlučivosti	24
4-3. Dodatni pribor	25
Dodatak	26
Medicinska norma.....	26
EMK podaci.....	27

Poglavlje 1 Uvod

Hvala vam što ste odabrali LCD monitor u boji tvrtke EIZO.

1-1. Značajke


● Hibridni monokromatski prikaz i prikaz u boji

Kada je omogućena funkcija Hybrid Gamma PXL (Hibridne game PXL), ovaj proizvod automatski razlikuje monokromatske dijelove i dijelove u boji iste slike na razini piksela te ih prikazuje u za njih optimalnim gradacijama.

● Jednostavnii električni vodovi

Pored ulaznog terminala DisplayPort, postoji i izlazni terminal.

Preko izlaznog terminala () moguće je reproducirati signal na drugom monitoru.

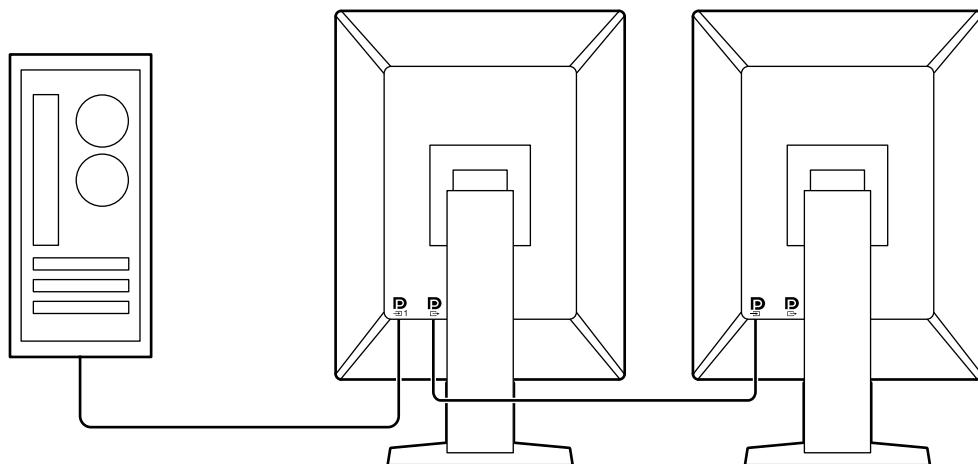


● Podrška za funkciju PinP

Sadrži funkciju PinP (Picture in Picture), koja se može koristiti za prikaz ulaznog videosignala osim glavnog ulaznog videosignala na podzaslonu u isto vrijeme. PinP podzaslon može se po potrebi prikazati ili sakriti.

● Kontrola kvalitete


- Monitor ima ugrađeni kalibracijski senzor (integrirani prednji senzor). Ovaj senzor omogućuje monitoru obavljanje kalibracije (SelfCalibration) i provjeru sivih tonova zasebno.

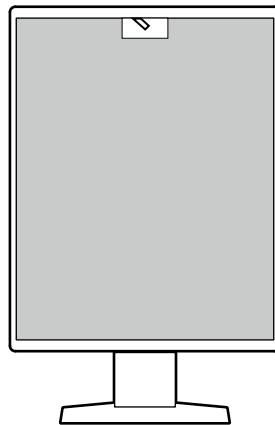

- Ako koristite RadiCS LE koji se isporučuje uz monitor, možete upravljati povješću za monitor, kao i ciljem za SelfCalibration i rasporedom provedbe.
- Softver za kontrolu kvalitete monitora RadiCS omogućava vam provedbu kontrole kvalitete koja ispunjava medicinske standarde/smjernice.


● Sadrži funkciju brzog punjenja pomoću USB Type-C®

Ta vam funkcija omogućuje da brzo napunite pametni telefon ili tablet.

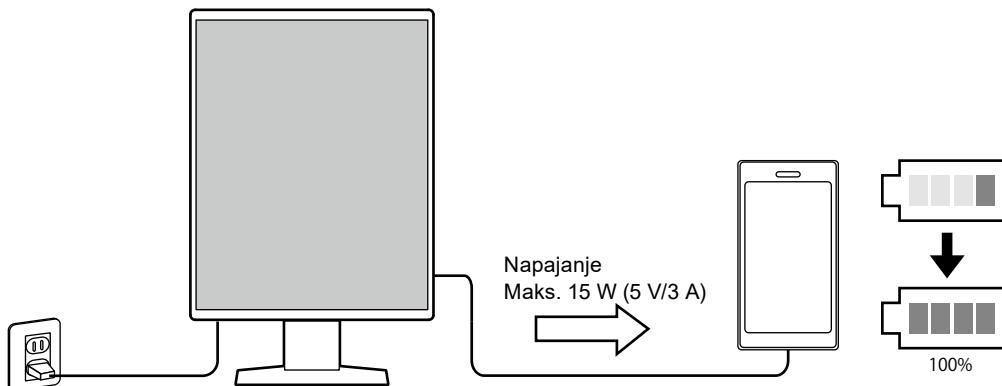

● Dizajn za uštedu na prostoru

Monitor posjeduje dva gornja ulaza za USB. Možete koristiti dva računala s jednim kompletom USB uređaja (miš, tipkovnica itd.).

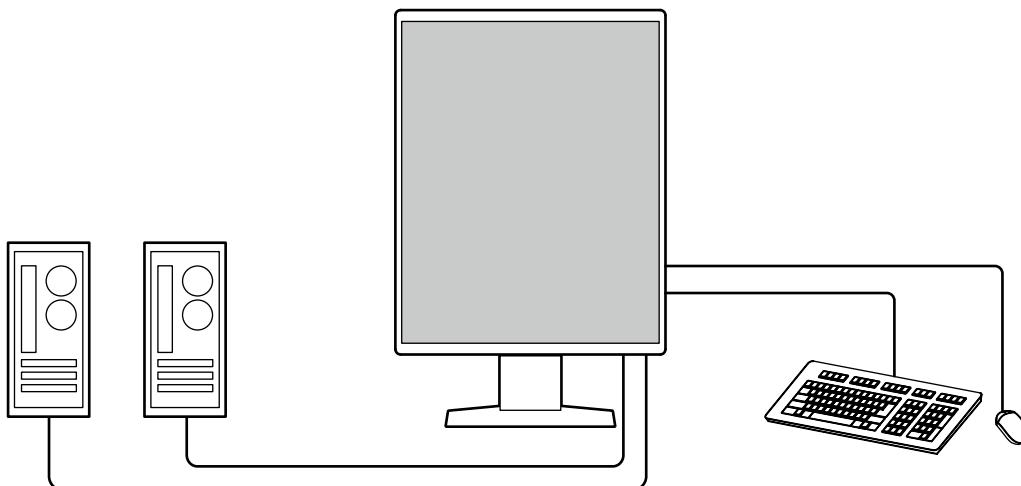

● Korištenje monitora s mišem i tipkovnicom

Zahvaljujući softveru za kontrolu kvalitete monitora RadiCS / RadiCS LE sljedeće radnje koje se odnose na monitor možete obavljati mišem i tipkovnicom:

- Prebacivanje između načina rada CAL Switch
- Prebacivanje između ulaznih signala
- Funkcija koja dodjeljuje bilo koji CAL Switch mode (Način rada CAL prekidača) dijelu zaslona i prikazuje sliku (Point-and-Focus)
- Prikazivanje ili skrivanje PinP podzaslona (Hide-and-Seek)
- Prebacivanje između računala koja se koriste za USB uređaje (Switch-and-Go)
- Ulazak u štedni način rada (Backlight Saver)
- Značajka koja privremeno povećava svjetlinu radi bolje vidljivosti dijagnostičkih slika (Instant Backlight Booster)

Napomena

- Softver RadiCS / RadiCS LE omogućava vam da prikažete ili sakrijete PinP podzaslon i istodobno se prebacujete između računala koja se koriste za upravljanje USB uređajima. Više informacija o postupku postavljanja potražite u Korisničkom priručniku za RadiCS / RadiCS LE.

1-2. Sadržaj pakiranja

Provjerite sadrži li pakiranje sve sljedeće stavke. Ako bilo koja od navedenih stavki nedostaje, obratite se dobavljaču ili lokalnom zastupniku tvrtke EIZO.

Napomena

- Preporučljivo je da kutiju i ambalažni materijal sačuvate kako bi se mogli koristiti za premještanje ili prijenos ovog proizvoda.

- Monitor
- Kabel napajanja



- Kabel digitanog singala (DisplayPort – DisplayPort): PP300 × 2



- USB kabel: UU300 × 2



- Disk s uslužnim programima za LCD monitor tvrtke EIZO (CD-ROM)
- Upute za upotrebu

● Disk s uslužnim programima za LCD monitor tvrtke EIZO

CD-ROM sadrži sljedeće stavke. Postupke pokretanja softvera ili referentne postupke datoteka potražite u datoteci "Readme.txt" na disku.

- Datoteka Readme.txt
- Softver za kontrolu kvalitete monitora RadiCS LE (za Windows)
- Korisnički priručnik
 - Upute za upotrebu ovog monitora
 - Priručnik za instalaciju monitora
 - Korisnički priručnik za RadiCS LE
- Vanjske dimenzije

RadiCS LE

RadiCS LE vam omogućava da obavljate sljedeće radnje kontrole kvalitete i radnje povezane s monitorom. Više informacija o postupku postavljanja potražite u Korisničkom priručniku za RadiCS LE.

Kontrola kvalitete

- Obavljanje kalibracije
- Prikazivanje rezultata testa u obliku popisa i izrada izvješća o testu
- Postavljanje cilja za SelfCalibration i rasporeda provedbe

Radnje povezane s monitorom

- Prebacivanje između načina rada CAL Switch
- Prebacivanje između ulaznih signala
- Funkcija koja dodjeljuje bilo koji CAL Switch mode (Način rada CAL prekidača) dijelu zaslona i prikazuje sliku (Point-and-Focus)
- Prikazivanje ili skrivanje PinP podzaslona (Hide-and-Seek)
- Prebacivanje između računala koja se koriste za USB uređaje (Switch-and-Go)
- Ulazak u štedni način rada (Backlight Saver)
- Značajka koja privremeno povećava svjetlinu radi bolje vidljivosti dijagnostičkih slika (Instant Backlight Booster)
- Značajka koja automatski prilagođava svjetlinu monitora kako bi odgovarala razini sobnog osvjetljenja kada se postavi na način Text (Tekst) (Auto Brightness Control)

Pažnja


- Specifikacije RadiCS LE podliježu izmjenama bez prethodne obavijesti. Najnoviju verziju RadiCS LE možete preuzeti s naše web stranice. www.eizoglobal.com
-

Upotreba softvera RadiCS LE

Informacije o instalaciji i upotrebi softvera RadiCS LE potražite u Korisničkom priručniku za RadiCS LE (na CD-ROM-u).

Pri uporabi softvera RadiCS LE povežite monitor s računalom isporučenim USB kabelom. Više informacija o povezivanju s monitorom potražite u dijelu „[2-2. Spajanje kabela](#)“ ([stranica 17](#)).

1-3. Upravljanje i funkcije

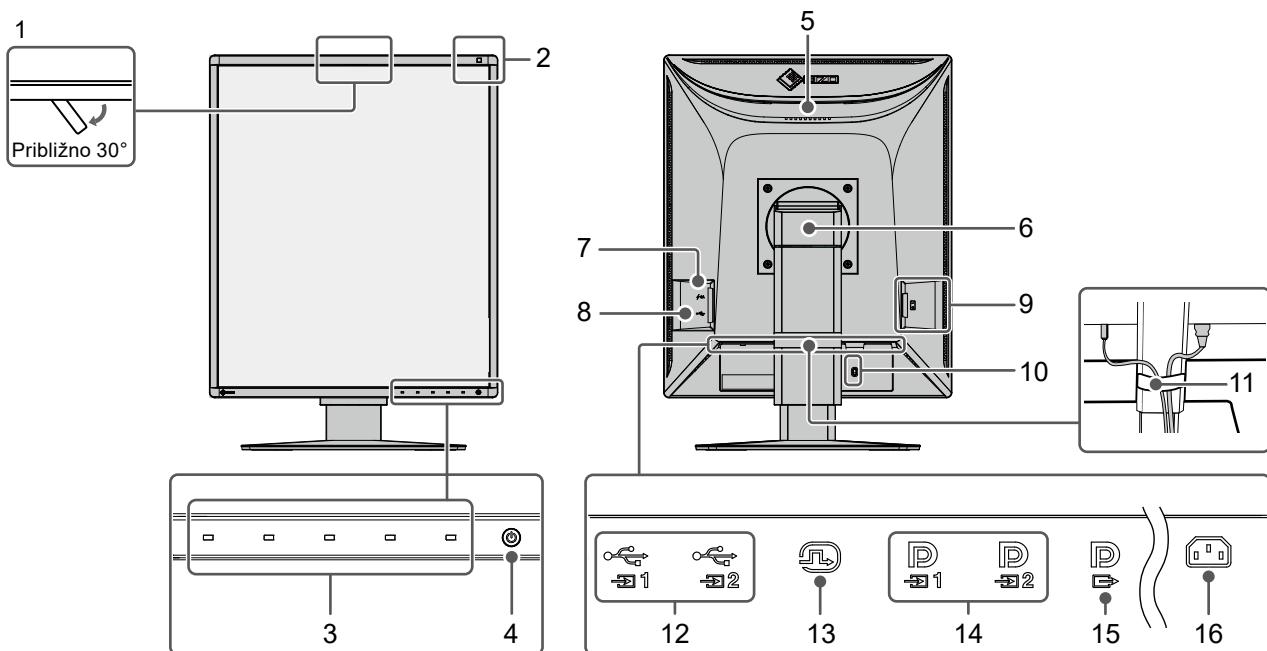

1. Integrirani prednji senzor (prenosivi)	Ovaj senzor koristi se za obavljanje kalibracije i provjere sivih tonova.
2. Senzor sobnog svjetla	Ovaj senzor mjeri osvjetljenje u okolini. Mjerenje osvjetljenja u okolini obavlja se pomoću softvera za kontrolu kvalitete RadiCS / RadiCS LE.
3. Sklopke rada	Prikazuje funkcionalni vodič. Postavite izbornike u skladu s funkcijama vodičem.
4. Prekidač	Uključuje ili isključuje napajanje. Kad uključite napajanje, zasvjetlit će pokazivač sklopke. Pokazivač mijenja boju ovisno o radnom stanju monitora. Zelena žaruljica: normalan način rada, Narančasto svjetlo: štedni način rada, isključena žaruljica: isključen monitor/isključeno mrežno napajanje
5. Ručka	Ovu ručku koristite za prenošenje. Pažnja <ul style="list-style-type: none">Čvrsto uhvatite i držite dno monitora dok držite ručku te pažljivo prenesite monitor kako vam ne bi ispao. Nemojte držati monitor za dio sa senzorima s prednje strane.
6. Postolje	Prilagođava visinu i kut (nagib i zakretanje) monitora.
7. USB priključnica tipa C (samo brzo punjenje)	Povežite je s USB uređajem. Pažnja <ul style="list-style-type: none">Ne podržava podatkovnu komunikaciju.
8. USB priključnica tipa A (donji ulaz za USB)	Povežite je s USB uređajem. Za serijsko povezivanje spojite kabel na gornji ulaz za USB drugog monitora.
9. Glavna sklopka mrežnog napajanja	Uključuje ili isključuje mrežno napajanje. ○ : Isključeno, : Uključeno
10. Utor za sigurnosnu bravu	U skladu sa sigurnosnim sustavom MicroSaver tvrtke Kensington.
11. Držać kabela	Drži kabele monitora.
12. USB priključnica tipa B (gornji ulaz za USB)	Povežite ovaj ulaz s računalom kada koristite softver koji zahtijeva USB povezivanje ili povežite USB uređaj (periferijski uređaj koji podržava USB) na donji ulaz za USB.
13. DVI-D priključnica	Spojite je s računalom.
14. DisplayPort ulazna priključnica	
15. DisplayPort izlazna priključnica	Za serijsko povezivanje spojite kabel na DisplayPort ulaznu priključnicu drugog monitora.
16. Priključnica napajanja	Spaja kabel napajanja.

Poglavlje 2 Ugradnja / Spajanje

2-1. Prije ugradnje proizvoda

Pažljivo pročitajte „[MJERE OPREZA](#)“ ([stranica 3](#)) i uvijek slijedite upute.

Ako ovaj proizvod smjestite na lakovani stol, boja može prianjati za dno postolja zbog sastava gume.

Prije upotrebe provjerite površinu stola.

● Zahtjevi za ugradnju

Ako monitor montirate na stalak, osigurajte dovoljno prostora na bočnim stranama te iznad i iza monitora.

Pažnja

- Postavite monitor tako da nikakvo svjetlo ne ometa prikaz na zaslonu.


2-2. Spajanje kabela

Pažnja

- Provjerite jesu li monitor, računalo i periferni uređaji isključeni.
- Prilikom zamjene trenutačnog monitora ovim monitorom prije spajanja računala pogledajte „[4-2. Kompatibilne razlučivosti](#)“ ([stranica 24](#)) da biste promijenili računalne postavke za razlučivost i frekvenciju vertikalnog skeniranja na one koje su dostupne za ovaj monitor.

1. Spajanje signalnih kabela.

Provjerite oblik priključnica i spojite kabele. Nakon spajanja DVI kabela, zategnite učvršćivače kako bi se osigurali konektor.

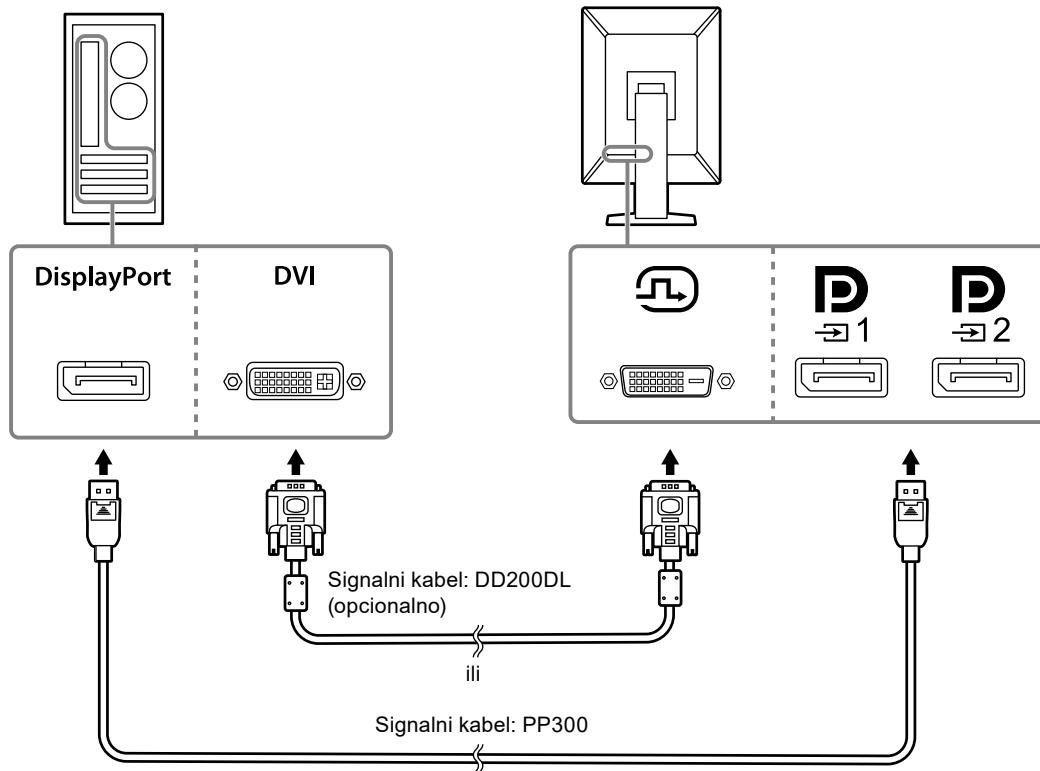

Pažnja

- Monitor ima dvije vrste priključnica DisplayPort: ulaznu i izlaznu. Kada priključujete monitor na računalo, priključite kabel na ulaznu priključnicu P_{1} .
- Pri serijskom spajaju priključite kabel na ulaznu priključnicu P_{1} .
- Pri priključivanju na više računala prebacite ulazni signal. Za pojedinosti pogledajte Priručnik za instalaciju (na CD-ROM-u).

Napomena


- Ako je kabele teško umetnuti, prilagodite kut zaslona monitora.
- Kada prikazujete signal DisplayPort 1 (P_{1}) ili DisplayPort 2 (P_{2}), dostupan je podzaslon PinP. Za pojedinosti pogledajte Priručnik za instalaciju (na CD-ROM-u).

Serijsko spajanje drugih monitora

Ulazni signal na uređaju  reproducira se na drugom monitoru.

Pažnja

- Posjetite web-stranicu EIZO za informacije o monitorima i grafičkim karticama koje se mogu koristiti za serijsko spajanje: www.eizoglobal.com
- Pri serijskom spajanju priključite kabel na ulaznu priključnicu .
- Za postavljanje serijskog spajanja trebate odabrati "Signal Format" (Format signala) – "DisplayPort 1" u izborniku Administrator Settings (Postavke administratora) i postaviti "Version" (Verzija) na "1.2". Za pojedinosti pogledajte Priručnik za instalaciju (na CD-ROM-u).
- Skinite kapicu  prije spajaja signalnog kabela.

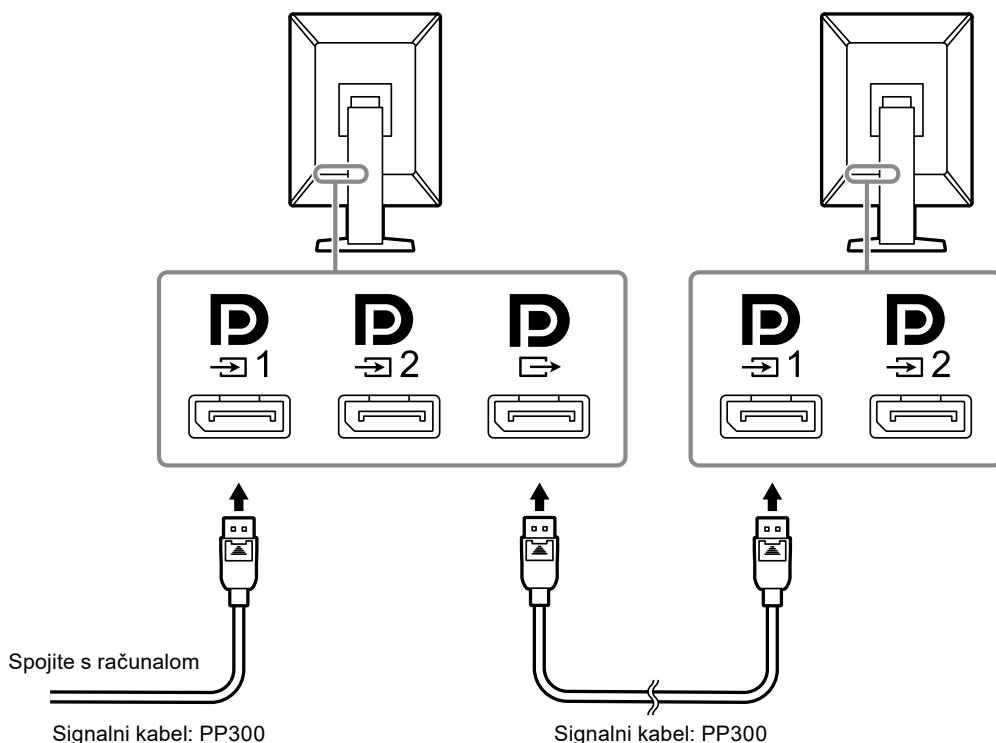


2. Uključite električni kabel u utičnicu i električnu priključnicu na monitoru.

Potpuno umetnite kabel napajanja u monitor.

3. Spojite USB kabel na gornji ulaz za USB na monitoru i na donji ulaz na računalu.

Kabelska priključnica potrebna je kada upotrebljavate softver RadiCS/RadiCS LE ili kada spajate USB uređaj (periferni uređaj spojen USB-om) na monitor.

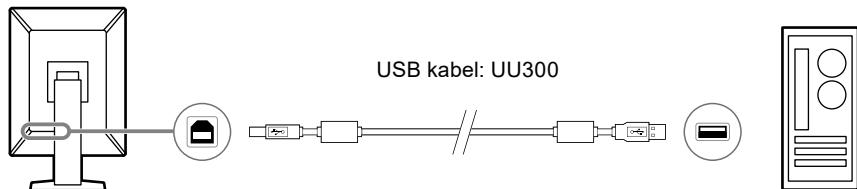


Pažnja

- Prilikom povezivanja monitora s računalom na kojem je instaliran RadiCS/RadiCS LE, povežite kabel na 1.
- Skinite kapicu prije upotrebe 2.

Napomena

- Prebacivanje između računala koja upotrebljavaju USB uređaje može se provesti priključivanjem dvaju računala na dva monitora kako je prikazano na sljedećoj slici.
- Pojedinosti o prebacivanju između računala koja upotrebljavaju USB uređaje potražite u Priručniku za instalaciju (na CD-ROM-u).

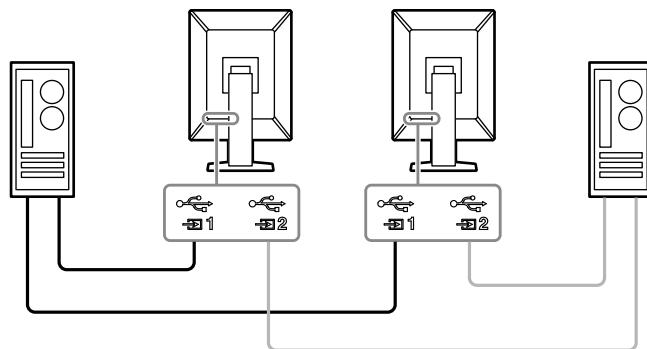

2-3. Uključivanje napajanja

1. Dodirnite za uključivanje napajanja monitora.

Pokazivač sklopke napajanja na monitoru zasvjetlit će zeleno.

Ako pokazivač ne zasvjetli, pogledajte „[Poglavlje 3 Nema slike](#)“ (stranica 22).

Napomena

- Kada dodirnete bilo koju sklopku rada osim  dok je napajanje monitora isključeno,  počinje treperiti kako biste znali gdje se nalazi sklopka napajanja.

2. Uključite računalo.

Pojavljuje se slika zaslona.

Ako se slika ne pojavi, dodatni savjet potražite u „[Poglavlje 3 Nema slike](#)“ (stranica 22).

Pažnja


- Za maksimalnu uštedu energije preporučujemo da gumb napajanja bude isključen. Kada ne upotrebjavate monitor, isključite izvor glavnog napajanja ili odvojite utikač za napajanje radi sigurnog prekida napajanja.

Napomena

- Da bi se maksimalno produžio vijek trajanja monitora smanjenjem degradacije svjetline te da bi se smanjila potrošnja energije, obavite sljedeće:
 - Upotrijebite funkciju za uštedu energije na računalu ili monitoru.
 - Isključite monitor nakon upotrebe.

2-4. Brzo punjenje USB-om tipa C

Pametni telefoni i tableti mogu se brzo napuniti tako da ih spojite na monitor pomoću USB-a tipa C.

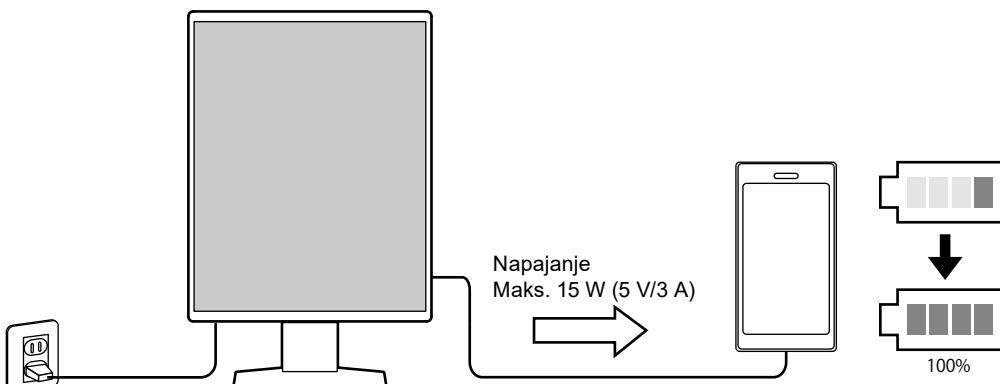


Pažnja

- Pripredite vlastiti kabel koji odgovara pametnom telefonu ili tabletu.

2-5. Prilagodba visine i kuta zaslona


Držite gornji i donji ili lijevi i desni rub monitora objema rukama i prilagodite visinu, nagib i zakrenutost zaslona u optimalan položaj za obavljanje zadatka.

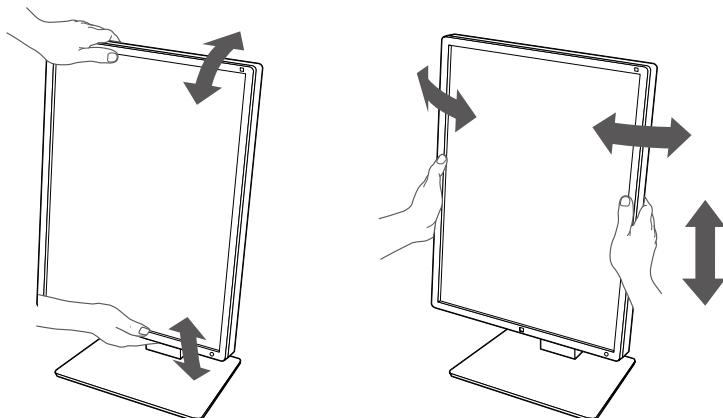

Pažnja

- Nakon završetka podešavanja, provjerite jesu li svi kabeli pravilno povezani.
- Nakon podešavanja visine i kuta provucite kabele kroz držač kabela.

Poglavlje 3 Nema slike

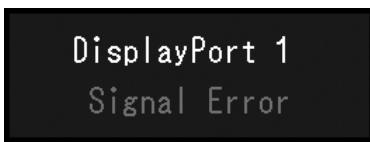Problem	Moguć uzrok i rješenje
1. Nema slike <ul style="list-style-type: none">Pokazivač sklopke napajanja ne svijetliPokazivač sklopke napajanja svijetli: ZelenoPokazivač sklopke napajanja svijetli: NarančastoPokazivač sklopke napajanja treperi: Narančasto, zeleno	<ul style="list-style-type: none">Provjerite je li kabel napajanja ispravno spojen.Uključite mrežnu sklopku.Dodirnite .Isključite mrežno napajanje, a zatim ga ponovo uključite.Povećajte "Brightness" (Svjetlina), "Contrast" (Kontrast) ili "Gain" (Pojačanje) u Setting menu (Izbornik za podešavanje). Za pojedinosti pogledajte Priručnik za instalaciju (na CD-ROM-u).Isključite mrežno napajanje, a zatim ga ponovo uključite.Prebacite ulazni signal. Za pojedinosti pogledajte Priručnik za instalaciju (na CD-ROM-u).Pomaknите miš ili pritisnite neku tipku na tipkovnici.Provjerite je li računalo uključeno.Provjerite je li signalni kabel ispravno spojen. Priklučite ga na  kada odaberete "DisplayPort 1", odnosno, na  kada odaberete "DisplayPort 2" u ulaznom signalu.  se koristi za izlaz kada se podešava serijsko spajanje.Isključite mrežno napajanje, a zatim ga ponovo uključite.Povežite putem signalnog kabla prema specifikacijama EIZO. Isključite mrežno napajanje, a zatim ga ponovo uključite.Ako je signalni kabel povezan na DisplayPort 1 () , pokušajte prebaciti verziju DisplayPorta. Za pojedinosti pogledajte Priručnik za instalaciju (na CD-ROM-u).
2. Pojavljuje se poruka ispod. <ul style="list-style-type: none">Ova poruka pojavljuje se kada nema ulaza signala. Primjer: Poruka pokazuje da je ulazni signal izvan navedenog frekvencijskog raspona. Primjer: 	<p>Ova poruka pojavljuje se kada signal nema ispravan ulaz iako monitor radi ispravno.</p> <ul style="list-style-type: none">Poruka prikazana lijevo može se pojaviti jer neka računala nemaju izlaz signala odmah nakon uključivanja.Provjerite je li računalo uključeno.Provjerite je li signalni kabel ispravno spojen. Spojite signalne kabele na priključnice odgovarajućeg ulaznog signala.Prebacite ulazni signal. Za pojedinosti pogledajte Priručnik za instalaciju (na CD-ROM-u).Ako je signalni kabel povezan na DisplayPort 1 () , pokušajte prebaciti verziju DisplayPorta. Za pojedinosti pogledajte Priručnik za instalaciju (na CD-ROM-u).Provjerite je li signalni kabel pravilno priključen. Je li signalni kabel spojen na  ili  za unos signala DisplayPort?  se koristi za izlaz kada se podešava serijsko spajanje.Isključite mrežno napajanje, a zatim ga ponovo uključite.Provjerite je li računalo konfiguirirano tako da odgovara razlučivosti i frekvenciji vertikalnog skeniranja monitora (pogledajte „4-2. Kompatibilne razlučivosti“ (stranica 24)).Ponovo podignite sustav računala.Odaberite odgovarajuću postavku pomoći uslužnog programa grafičke kartice. Više informacija potražite u Korisničkom priručniku grafičke ploče.

Poglavlje 4 Specifikacije

4-1. Popis specifikacija

Vrsta		RX370: Protiv odsjaja RX370-AR: Protiv odraza	
LCD ploča	Vrsta	U boji (IPS)	
	Pozadinsko osvjetljenje	LED	
	Veličina	54,1 cm (21,3 inča)	
	Razlučivost (H × V)	1536 × 2048	
	Veličina prikaza (H × V)	324,9 mm × 433,2 mm	
	Veličina piksela	0,2115 mm	
	Boje prikaza	10-bitni (DisplayPort): 1073,74 milijuna boja (maks.) (iz palete od 543 milijardi boja) 8-bitni (DisplayPort ^{*1} / DVI): 16,77 milijuna boja (iz palete od 543 milijardi boja)	
	Kutovi prikaza (H / V, tipično)	178° / 178°	
	Preporučena svjetlina	500 cd/m ²	
	Vrijeme odgovora (tipično)	25 ms (crno -> bijelo -> crno)	
Videosignalni	Ulazni priključci	DisplayPort × 2, DVI-D (dual link) × 1	
	Izlazni terminal	DisplayPort × 1	
	Frekvencija horizontalnog skeniranja	31 kHz – 127 kHz	
	Frekvencija vertikalnog skeniranja ^{*2}	29,0 Hz – 61,5 Hz (720 × 400: 69 Hz – 71 Hz)	
	Način sinkronizacije okvira	29,5 Hz – 30,5 Hz, 59,0 Hz – 61,0 Hz	
	Točkasti sat	DisplayPort: 25 MHz – 215 MHz DVI : 25 MHz – 165 MHz, 165 MHz – 215 MHz (Dual link)	
USB	Ulaz	Gornji	USB-B × 2
		Donji	USB-A × 2
		Samo punjenje	USB-C® × 1 ^{*3}
	Standard		USB Specification Revision 2.0
	Dotok struje	Donji (USB-A)	Maks. 500 mA po ulazu
		Samo brzo punjenje (USB-C) ^{*3}	Maks. 15 W (5 V/3 A)
Napajanje	Ulaz		100 – 240 VAC ±10 %, 50 / 60 Hz 1,10 A – 0,45 A
	Maksimalna potrošnja energije		105 W ili manje
	Štedni način rada		1,0 W ili manje ^{*4}
	Stanje čekanja		1,0 W ili manje ^{*5}
Fizičke specifikacije	Dimenzije (Š × V × D)		341,3 mm × 481,5 mm – 571,5 mm × 200,0 mm (nagib: 0°) 341,3 mm × 509,3 mm – 599,3 mm × 266,7 mm (nagib: 30°)
	Dimenzije (Š × V × D) (bez postolja)		341,3 mm × 463,0 mm × 78,0 mm
	Neto težina		Približno 8,0 kg
	Neto težina (bez postolja)		Približno 5,2 kg
	Raspon prilagodbe visine		90 mm (nagib: 0°)
	Nagib		Gore 30°, dolje 5°
	Zakretanje		70°
	Rotacija		90°

Okolišni uvjeti za rad	Temperatura	0 °C – 35 °C (32 °F – 95 °F)
	Vlažnost	20 % – 80 % R. V. (bez kondenzacije)
	Tlak zraka	540 hPa – 1060 hPa
Okolišni uvjeti za prijevoz/ skladištenje	Temperatura	-20 °C – 60 °C (-4 °F – 140 °F)
	Vlažnost	10 % – 90 % R. V. (bez kondenzacije)
	Tlak zraka	200 hPa – 1060 hPa

*1 Kada je prikazan podzaslon PinP

*2 Podržana frekvencija vertikalnog skeniranja varira ovisno o razlučivosti. Više informacija potražite u dijelu „4-2. Kompatibilne razlučivosti“ (stranica 24).

*3 Samo za punjenje. Ne podržava videosignale ni podatkovnu komunikaciju

*4 Kada se koristi ulaz DisplayPort 1, gornji ulaz za USB nije povezan, "Power Save" (Ušteda energije): "High" (Visoko), "DP Power Save" (DP ušteda energije): "On" (Uključeno), "Signal Format" (Format signala) – "DisplayPort 1" – "Version" (Verzija): "1.1", "Auto Input Detection" (Automatska detekcija ulaza): "off" (Isključeno), nije spojeno vanjsko opterećenje

*5 Kada gornji ulaz za USB nije povezan, "DP Power Save" (DP ušteda energije): "On" (Uključeno), "Signal Format" (Format signala) – "DisplayPort 1" – "Version" (Verzija): "1.1", nije spojeno vanjsko opterećenje

4-2. Kompatibilne razlučivosti

Monitor podržava sljedeće razlučivosti. Informacije o kompatibilnim razlučivostima PinP podzaslona potražite u Priručniku za instalaciju.

√: Podržano

Razlučivost (H × V)	Frekvencija vertikalnog skeniranja (Hz)	DisplayPort		DVI	
		Portretno	Pejzažno	Portretno	Pejzažno
720 × 400	70	√	√	√	√
640 × 480	60	√	√	√	√
800 × 600	60	√	√	√	√
1024 × 768	60	√	√	√	√
1280 × 1024	60	√	√	√	√
1600 × 1200	60	-	√	-	√
1536 × 2048	60	√*1	-	√*1*2*4	-
1536 × 2048	46	-	-	√*1*3	-
2048 × 1536	60	-	√*1	-	√*1*2*4
2048 × 1536	47	-	-	-	√*1*3

*1 Preporučena razlučivost

*2 Kada se "Preferred Refresh Rate" (Preferirana stopa osvježavanja) postavi na "High" (Visoko)

*3 Kada se "Preferred Refresh Rate" (Preferirana stopa osvježavanja) postavi na "Low" (Nisko)

*4 Ovisno o računalu koje koristite, frekvencija vertikalnog skeniranja od 60 Hz možda nije dostupna. U tom slučaju pokušajte promijeniti "Preferred Refresh Rate" (Preferirana stopa osvježavanja) za DVI. Za pojedinosti proučite Priručnik za instalaciju.

4-3. Dodatni pribor

Sljedeća dodatna oprema prodaje se odvojeno.

Za najnovije informacije o dodatnoj opremi i informacije o najnovijoj kompatibilnoj grafičkoj kartici pogledajte našu web-stranicu. www.eizoglobal.com

Komplet za kalibraciju	RadiCS UX2 ver. 5.0.8 ili novija RadiCS Version Up Kit ver. 5.0.8 ili novija
Softver za mrežno QC upravljanje	RadiNET Pro ver. 5.0.8 ili novija
Pribor za čišćenje	ScreenCleaner
Ugodno osvjetljenje za čitanje	RadiLight
Nosač	AAH-02B3W LA-011-W
Štitnik ploče	RP-915
Nosač za tanki klijent ili mini računalo	PCSK-R1
Signalni kabel (DVI-D – DVI-D)	DD200DL

Dodatak

Medicinska norma

- Bit će osigurano da konačni sustav bude u skladu sa zahtjevom IEC60601-1-1.
- Električna oprema može emitirati elektromagnetske valove koji mogu utjecati na monitor, ograničavati njegov rad ili rezultirati njegovim kvarom. Ugradite opremu u kontroliranom okruženju u kojem nema takvih efekata.

Klasifikacija opreme

- Vrsta zaštite od strujnog udara : Klasa I
- EMK klasa: IEC60601-1-2:2014 Grupa 1 Klasa B
- Klasifikacija medicinskog uređaja (EU): Klasa I
- Način rada : Neprekidno
- IP Klasa : IPX0

EMK podaci

Serija RadiForce posjeduje performanse koje prikazuju slike na odgovarajući način.

Okruženja za predviđenu namjenu

Serija RadiForce predviđena je za upotrebu u profesionalnim zdravstvenim ustanova kao što su klinike i bolnice.

Sljedeća okruženja nisu prikladna za seriju RadiForce:

- Kućna zdravstvena okruženja
- U blizini visokofrekventne kirurške opreme kao što su elektrokirurški noževi
- U blizini kratkotalasnih instrumenata za lijeчењe
- U prostorijama zaštićenim od radiofrekvencije u kojima se nalazi medicinska oprema za MR
- U zaštićenim posebnim okruženjima
- U vozilima, uključujući vozila hitne pomoći.
- Druga posebna okruženja



UPOZORENJE

Serija RadiForce zahtijeva posebne mjere opreza u vezi s EMK i mora biti ugrađena. Morate pažljivo pročitati dijelove "EMK podaci" i "MJERE OPREZA" u ovom dokumentu te se pridržavati svih uputa prilikom ugradnje i upotrebe proizvoda.

Serija RadiForce ne smije se upotrebljavati u blizini ili zajedno s drugom opremom. Ako su upotreba u blizini ili zajednička upotreba nužne, oprema ili sustav trebaju se promatrati kako bi se potvrdio normalan rad u konfiguraciji u kojoj će se upotrijebiti.

Kada se koristi prenosiva RF komunikacijska oprema, održavajte udaljenost od 30 cm (12 inča) ili više od svih dijelova, uključujući kabele, serije RadiForce. U suprotnom može doći do pogoršanja performansi ove opreme.

Svatko tko spaja dodatnu opremu na signalne ulaze ili signalne izlaze, konfigurira medicinski sustav, odgovoran je da sustav bude u skladu sa zahtjevima IEC/EN60601-1-2.

Obavezno koristite kabele pričvršćene za proizvod ili kabele prema specifikacijama EIZO.

Ako se koriste kabeli koje nije odobrila ili isporučila tvrtka EIZO s ovom opremom, može doći do povećanja elektromagnetske emisije ili smanjenja elektromagnetske otpornosti i nepravilnog rada.

Duljina	Namjenski kabeli tvrtke EIZO	Maks. duljina kabela	Zaštita	Feritna jezgra
Signalni kabel (DisplayPort)	PP300 / PP200	3 m	Zaštićen	Bez feritnih jezgri
Signalni kabel (DVI)	DD300DL / DD200DL	3 m	Zaštićen	S feritnim jezgrama
USB kabel	UU300 / MD-C93	3 m	Zaštićen	S feritnim jezgrama
Kabel napajanja (s uzemljenjem)	-	3 m	Nezaštićen	Bez feritnih jezgri

Tehnički opisi

Elektromagnetske emisije

Serija RadiForce namijenjena je za upotrebu u elektromagnetskom okruženju koje je navedeno u nastavku. Klijent ili korisnik serije RadiForce treba osigurati da se upotrebljava u tom okruženju.

Test emisije	Usklađenost	Elektromagnetsko okruženje – upute
RF emisije CISPR11 / EN55011	Grupa 1	Serija RadiForce upotrebljava RF energiju za svoju internu funkciju. Stoga je njezina RF emisija vrlo niska i vjerojatno neće uzrokovati interferenciju s obližnjom električnom opremom.
RF emisije CISPR11 / EN55011	Klasa B	Serija RadiForce pogodna je za upotrebu u svim prostorima, uključujući kućne prostore i one koji su izravno povezani s javnom niskonaponskom mrežom koja opskrbljuje zgrade koje se upotrebljavaju u stambene svrhe.
Harmoničke emisije IEC / EN61000-3-2	Klasa D	
Kolebanja napona / treperenje IEC / EN61000-3-3	U skladu	

Elektromagnetska otpornost

Serija RadiForce testirana je na sljedećim razinama sukladnosti u skladu sa zahtjevima za testiranje za profesionalne zdravstvene ustanove navedenim u standardu IEC / EN60601-1-2.

Klijenti i korisnici serije RadiForce moraju se pobrinuti da se serija RadiForce koristi u sljedećim okruženjima:

Test otpornosti	Razina testiranja za profesionalne zdravstvene ustanove	Razina usklađenosti	Elektromagnetsko okruženje – upute
Elektrostatičko pražnjenje (ESD) IEC / EN61000-4-2	±8 kV pražnjenje pri kontaktu ±15 kV pražnjenje u zrak	±8 kV pražnjenje pri kontaktu ±15 kV pražnjenje u zrak	Podovi trebaju biti drveni, betonski ili popločani keramikom. Ako su podovi pokriveni sintetičkim materijalom, relativna vlažnost treba biti najmanje 30 %.
Brze električne prijelazne pojave / kratki impulsi IEC / EN61000-4-4	±2 kV električni vodovi ±1 kV ulazni / izlazni vodovi	±2 kV električni vodovi ±1 kV ulazni / izlazni vodovi	Kvaliteta električne mreže mora biti onakva kakva je tipična za komercijalno ili bolničko okruženje.
Udarni prenaponi IEC / EN61000-4-5	±1 kV vod do voda ±2 kV vod do uzemljenja	±1 kV vod do voda ±2 kV vod do uzemljenja	Kvaliteta električne mreže mora biti onakva kakva je tipična za komercijalno ili bolničko okruženje.
Padovi napona, kratki prekidi i varijacije napona na električnim ulaznim vodovima IEC / EN61000-4-11	0 % U _T (100 % pad u U _T) 0,5 ciklusa i 1 ciklus 70 % U _T (30 % pad u U _T) 25 ciklusa 0 % U _T (100 % pad u U _T) 5 s	0 % U _T (100 % pad u U _T) 0,5 ciklusa i 1 ciklus 70 % U _T (30 % pad u U _T) 25 ciklusa 0 % U _T (100 % pad u U _T) 5 s	Kvaliteta električne mreže mora biti onakva kakva je tipična za komercijalno ili bolničko okruženje. Ako je korisniku serije RadiForce potreban neprekidan rad tijekom prekida u mreži, preporučuje se da se serija RadiForce napaja iz izvora napajanja ili baterije koji nemaju prekida.
Magnetska polja frekvencije napajanja IEC / EN61000-4-8	30 A/m (50 / 60 Hz)	30 A/m	Magnetska polja frekvencije napajanja trebaju biti na razinama koje su tipične za lokaciju u tipičnom komercijalnom ili bolničkom okruženju. Proizvod se mora držati na udaljenosti od najmanje 15 cm od izvora magnetskih polja frekvencije napajanja tijekom upotrebe.

Elektromagnetska otpornost

Serija RadiForce testirana je na sljedećim razinama sukladnosti u skladu sa zahtjevima za testiranje za profesionalne zdravstvene ustanove navedenim u standardu IEC / EN60601-1-2.

Klijenti i korisnici serije RadiForce moraju se pobrinuti da se serija RadiForce koristi u sljedećim okruženjima:

Test otpornosti	Razina testiranja za profesionalne zdravstvene ustanove	Razina usklađenosti	Elektromagnetsko okruženje – upute
Vođene smetnje koje uzrokuju RF polja IEC / EN61000-4-6	3 Vrms 150 kHz - 80 MHz 6 Vrms ISM pojasi između 150 kHz i 80 MHz	3 Vrms 6 Vrms	Prenosiva i mobilna RF komunikacijska oprema ne smije se upotrebljavati bliže bilo kojem dijelu serije RadiForce, uključujući kabele, nego što je preporučena udaljenost izračunana jednadžbom primjenjivom na frekvenciju prijenosnika. Preporučena udaljenost $d = 1,2\sqrt{P}$
Zračena RF polja IEC / EN61000-4-3	3 V/m 80 MHz - 2,7 GHz	3 V/m	$d = 1,2\sqrt{P}$, 80 MHz - 800 MHz $d = 2,3\sqrt{P}$, 800 MHz - 2,7 GHz Pri čemu je "P" maksimalna izlazna snaga prijenosnika u vatima (W) u skladu s proizvođačem prijenosnika, a "d" je preporučena udaljenost u metrima (m). Jačine polja iz fiksnih RF prijenosnika, kako je utvrđeno ispitivanjem elektromagnetskog mjesta ^{a)} , trebaju biti manje od razine usklađenosti u svakom frekvencijskom rasponu ^{b)} . Može doći do interferencije u blizini opreme označene sljedećim simbolom. 

Napomena 1 U_T je mrežni izmjenični napon koji prethodi primjeni razine testa.

Napomena 2 Pri 80 MHz i 800 MHz primjenjuje se veći frekvencijski raspon.

Napomena 3 Smjernice za vođene smetnje koje uzrokuju RF polja ili zračena RF polja ne moraju biti primjenjive u svim slučajevima. Elektromagnetsko širenje pod utjecajem je apsorpcije i odraza konstrukcija, predmeta i ljudi.

Napomena 4 ISM pojasi između 150 kHz i 80 MHz iznose od 6,765 MHz do 6,795 MHz, od 13,553 MHz do 13,567 MHz, od 26,957 MHz do 27,283 MHz i od 40,66 MHz do 40,70 MHz.

- a) Jačine polja iz fiksnih prijenosnika, kao što su osnovne postaje za radio (mobilne/bežične) telefone i zemaljske mobilne radiouređaje, amaterski radio, AM i FM radioemitiranje te TV emitiranje, ne mogu se teoretski točno predvidjeti. Za procjenu elektromagnetskog okruženja zbog fiksnih RF prijenosnika, treba uzeti u obzir ispitivanje elektromagnetskog mjesta. Ako izmjerena jačina polja na lokaciji na kojoj se upotrebljava serija RadiForce premašuje primjenjivu razinu RF usklađenosti iznad, serija RadiForce treba se promatrati kako bi se potvrdio normalan rad. Ako se primijeti neobično ponašanje, mogu biti potrebne dodatne mjere, kao što je preusmjeravanje ili premještanje serije RadiForce.
- b) Preko frekvencijskog raspona od 150 kHz do 80 MHz, jačine polja moraju biti manje od 3 V/m.

Preporučene udaljenosti između prenosive ili mobilne RF komunikacijske opreme i serije RadiForce

Serija RadiForce namijenjena je za upotrebu u elektromagnetskom okruženju u kojem su zračene RF smetnje kontrolirane. Klijent ili korisnik serije RadiForce može pomoći u sprječavanju elektromagnetske interferencije održavanjem minimalne udaljenosti između prenosive i mobilne RF komunikacijske opreme (prijenosnika) i serije RadiForce. Potvrđena je otpornost na polja u blizini od sljedeće RF bežične komunikacijske opreme:

Mjerna frekvencija (MHz)	Širina pojasa a) (MHz)	Usluga a)	Modulacija b)	Maksimalna snaga (W)	Maksimalna udaljenost (m)	IEC / EN60601 razina testa (V/m)	Razina usklađenosti (V/m)
385	380 - 390	TETRA 400	Modulacija pulsa ^{b)} 18 Hz	1,8	0,3	27	27
450	430 - 470	GMRS 460, FRS 460	FM odstupanje od ± 5 kHz sinus od 1 kHz	2	0,3	28	28
710	704 - 787	LTE pojas 13, 17	Modulacija pulsa ^{b)} 217 Hz	0,2	0,3	9	9
745							
780							
810	800 - 960	GSM 800 / 900, TETRA 800, iDEN 820 CDMA 850, LTE pojas 5	Modulacija pulsa ^{b)} 18 Hz	2	0,3	28	28
870							
930							
1720	1700 - 1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE pojas 1, 3, 4, 25; UMTS	Modulacija pulsa ^{b)} 217 Hz	2	0,3	28	28
1845							
1970							
2450	2400 - 2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE pojas 7	Modulacija pulsa ^{b)} 217 Hz	2	0,3	28	28
5240	5100 - 5800	WLAN 802.11 a/n	Modulacija pulsa ^{b)} 217 Hz	0,2	0,3	9	9
5500							
5785							

a) Za neke usluge su uključene samo odlazne frekvencije.

b) Valovi nosioci moduliraju se pomoću kvadratnog valnog signala 50 % -trog radnog ciklusa.

Serija RadiForce namijenjena je za upotrebu u elektromagnetskom okruženju u kojem su zračene RF smetnje kontrolirane. Za drugu prenosivu i mobilnu RF komunikacijsku opremu (prijenosnike) minimalna udaljenost između prenosive i mobilne RF komunikacijske opreme (prijenosnika) i serije RadiForce kako je preporučeno u nastavku, u skladu s maksimalnom izlaznom snagom komunikacijske opreme.

Nazivna maksimalna izlazna snaga prijenosnika (W)	Udaljenost u skladu s frekvencijom prijenosnika (m)		
	od 150 kHz do 80 MHz d = 1,2√P	od 80 MHz do 800 MHz d = 1,2√P	od 800 MHz do 2,7 GHz d = 2,3√P
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Za prijenosnike s maksimalnom izlaznom snagom koja nije gore navedena preporučena udaljenost "d" u metrima (m) može se procijeniti upotrebom jednadžbe primjenjive na frekvenciju prijenosnika, pri čemu je "P" maksimalna izlazna snaga prijenosnika u vatima (W) u skladu s proizvođačem prijenosnika.

Napomena 1	Pri 80 MHz i 800 MHz primjenjuje se udaljenost za veći frekvencijski raspon.
Napomena 2	Ove smjernice nisu primjenjive u svim situacijama. Elektromagnetsko širenje pod utjecajem je apsorpcije i odraza konstrukcija, predmeta i ljudi.



EIZO Corporation

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

艺卓显像技术(苏州)有限公司

中国苏州市苏州工业园区展业路 8 号中新科技工业坊 5B

EC REP

EIZO GmbH

Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany



03V28807C1
IFU-RX370