

用户手册

RP-915


EIZO 54 cm (21.3 英寸) 级别液晶显示器的屏幕保护膜

注意

- 屏幕保护膜的表面容易变脏 (沾上灰尘或指印)。安装 / 拆卸屏幕保护膜时应使用随附的手套。
- 请使用随附的胶带, 安装时小心不要让屏幕保护膜划伤液晶面板或外壳。此外不要经常取下屏幕保护膜, 否则可能划伤或损坏液晶面板。
- 液晶显示器与选购的屏幕保护膜一起使用时, 最好避免显示器面朝下。否则屏幕保护膜可能会弯曲或从显示器上脱落。
- 若在安装屏幕保护膜后使用集成式前传感器, 请务必使用RadiCS / RadiCS LE执行关联。参照各自的用户手册了解详情。

安装

安装之前, 擦除液晶面板上的灰尘和污垢。

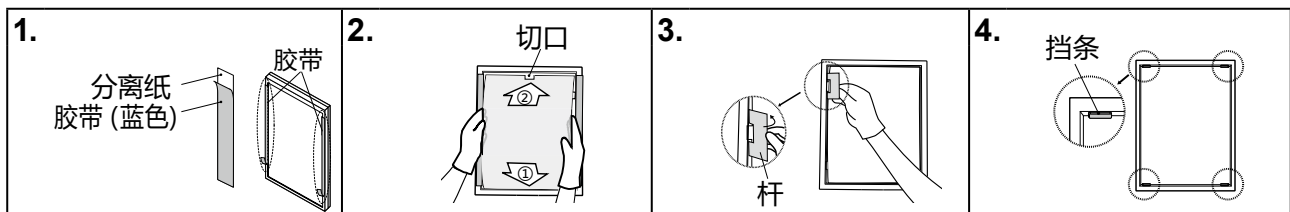

1. 从分离纸上撕下胶带, 将其粘在外壳的左、右两边。
2. 将屏幕保护膜卡入面板边框的槽中, 先下 (1) 后上 (2)。
屏保上有一个和传感器形状匹配的切口。安装屏幕保护膜时, 将切口对准传感器位置。若方向弄错, 可能会损坏传感器。
3. 用随附的工具 (杆) 将屏幕保护膜的 (4个) 凸起插入侧面凹槽。
把杆放在屏幕保护膜的凸起上, 朝液晶面板移动, 进行安装。将保护膜紧密地装入液晶面板, 不要留下开口。
4. 在 RX360/RX270/RX370/MX217 上安装屏幕保护膜时, 将挡片固定到外壳上。
撕下挡片的背衬纸, 将其安装到外壳上半部分的2处以及外壳下半部分的2处。
5. 从外壳上撕下胶带。

拆卸

把杆放在屏幕保护膜的凸起上, 朝向外壳移动, 将其取下。

清洁

本产品随附专用清洁布, 用于清除保护膜上的污垢。

如有必要, 请将小块布用水蘸湿, 增强其清洁能力, 以除去顽垢。

注意

- 本产品随附专用清洁布, 用于清除保护膜上的污垢。否则可能划伤液晶面板表面。
- 酒精、消毒液等化学试剂可能导致机壳或面板光泽度变化、失去光泽、褪色及图像质量降低。
- 切勿使用任何可能会损伤机壳或面板的稀释剂、苯、蜡和研磨型清洗剂。

注

- 建议使用选购的ScreenCleaner清洁机壳和面板表面。

仕様

表面处理	表面处理防发射涂层 (两面)	表面硬度	4H
反射率	小于1%	可见光透过率	大于95.0%
尺寸 / 净重	327.4 mm (宽度) × 435.3 mm (高度) × 1.2 mm (深度) / 约210 g		
付属品	杆 (屏幕保护膜用), 手套, 清洁布, 用户手册, 胶带4件 (2套), 挡条4块		



EIZO Corporation

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

EIZO Europe GmbH

Belgrader Straße 2, 41069 Mönchengladbach, Germany

EIZO 株式会社

〒 924-8566 石川県白山市下柏野町 153 番地

www.eizoglobal.com

www.eizo.co.jp

Copyright © 2016 - 2023 EIZO Corporation. All rights reserved.

00N0L957D1
UM-RP-915-AL

4th Edition - February, 2023 Printed in Japan.